



WÓZEK SPECJALNY INWALIDZKI

O M B R E L O TM



INSTRUKCJA OBSŁUGI





Wytwórca ponosi odpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie sprzętu wyłącznie w przypadku jego zakupu u wykwalifikowanego pracownika firmy **Akces-MED Sp. z o.o.** lub w wyspecjalizowanym sklepie medycznym.



Akces-MED Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i handlowych w treści instrukcji bez wcześniejszego uprzedzenia.



Wyrób Medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych. Na wyrób producent wystawił stosowną deklarację zgodności.



Firma **Akces-MED Sp. z o.o.** wdrożyła system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 13485 w zakresie projektowania całości produkcji, sprzedaży i serwisu. System certyfikowany przez Det Norske Veritas.

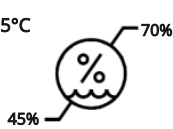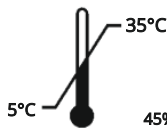



SPIS TREŚCI

1. Przeznaczenie instrukcji.....	6
2. Wskazania do stosowania wózka.....	6
3. Ogólna budowa wózka Ombrello.....	7
3.1. Wyposażenie standardowe.....	7
3.2. Wyposażenie ponadstandardowe.....	9
4. Tabela wymiarowa	12
5. Szczegółowy opis montażu wózka.....	13
6. Szczegółowy opis obsługi wózka.....	13
6.1. Składanie wózka.....	13
6.2. Rozkładanie wózka.....	15
6.3. Koła, Hamulec	16
6.4. Podnózek.....	18
6.5. Podparcie głowy.....	22
6.6. Zagłówek.....	23
6.7. Siedzisko.....	23
6.8. Pasy 5-punktowe.....	24
7. Montaż wyposażenia ponadstandardowego.....	28
7.1. OMO_402 Parasolka.....	28
7.2. OMO_505 Kosz pod siedzisko.....	29
7.3. OMO_126 Pas tułowia.....	30
7.4. OMO_128 Klin międzyudowy.....	31
7.5. OMO_405 Daszek	32
7.7. OMO_420 Daszek z osłonami bocznymi.....	33
7.8. OMO_411 Uchwyt na kubek.....	35
7.9. OMO_408 Osłona przeciwdeszczowa.....	36
7.10. OMO_113 Pas stabilizujący tułów.....	38
7.11 OMO_121 Zagłówek z podparciem głowy.....	38
7.12 OMO_115 Pas łydkowy.....	39
7.13 OMO_508 Torby boczne.....	39
7.14 OMO_403 Stolik.....	40
7.15 OMO_412 Poduszka Elastico siedziska.....	41
7.16 OMO_413 Poduszka Elastico oparcia.....	41
7.17 OMO_124 Pelota lędźwiowa.....	43
7.18 OMO_507 Pokrowiec na butlę tlenową.....	44
7.19 OMO_114 Kamizelka H	45
OMO_130 Kamizelka 4-punktowa.....	45
7.20 OMO_125 Kamizelka 6-punktowa.....	46





7.21	OMO_417 Śpiwór zimowy.....	47
7.22	OMO_416 Śpiwór letni.....	50
7.23	OMO_135 Boczne peloty sztywne.....	53
7.24	OMO_419 Poduszka siedziska profilowane uda.....	54
	OMO_421 Poduszka siedziska profilowany klin.....	54
7.25	OMO_129 Pasy odwodząco-stabilizujące uda.....	54
7.26	OMO_003 Barijerka.....	58
8.	Użytkowanie wyrobu	61
8.1.	Przygotowanie pacjenta.....	61
8.2.	Instrukcja użytkowania wózka.....	62
8.3.	Instrukcja użytkowania kamizelek.....	63
9.	Zasady bezpieczeństwa.....	66
10.	Warunki gwarancji.....	68
11.	Konserwacja i czyszczenie.....	69
12.	Oznakowanie.....	73



WSTĘP

Lekki, składany w formę parasolki i bardzo wytrzymały wózek dla dzieci oraz dorosłych. Posiada innowacyjne siedzisko BodyPrint™, które za pomocą pasów możemy dopasować do użytkownika. Siedzisko może być płaskie lub wklęsłe, wszystko zależne od potrzeb i dysfunkcji. Stały kąt pochylenia siedziska 30° (funkcja kubełkowa), zmniejsza nacisk na tkankę miękką, zapobiegając odleżynom. Daje też wiele innych korzyści.

Wózek OMBRELO™ jest bardzo wygodny i stabilny, a przy tym poręczny i łatwy w manewrowaniu. Idealnie sprawdza się do przewożenia osób na badania czy zabiegi w szpitalu, jak również podczas długich spacerów na świeżym powietrzu. Bardzo prosty i łatwy w obsłudze.

Regulowane podnóżki FlipFlap™ możemy odchylić na boki, aby ułatwić wejście do wózka i wyjście z niego. Produkt dostępny w 4 rozmiarach, a największy z nich przeznaczony jest dla osób o wadze do 120 kg. Jeśli masz specjalne wymagania i szukasz doskonałej stabilizacji na pewno znajdziesz dla siebie odpowiednie rozwiązanie w naszej bogatej ofercie akcesoriów.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji. Znajdziecie w niej Państwo informacje o naszym produkcie oraz dowiedzie się, jak bezpiecznie i efektywnie z niego korzystać.

Jeśli macie Państwo pytania lub uwagi, prosimy o kontakt z nami:

Konsultant medyczny: tel.kom. +48 516 183 883

Akces-MED Sp. z o.o.: tel. +48 17 864 04 70

e-mail: produkcja@akces-med.com

Dziękujemy za zakup produktu naszej firmy!



Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu, użytkownik jest zobowiązany do zaznajomienia się z niniejszą instrukcją obsługi. Prosimy pamiętać, że stosowanie się do wskazówek zawartych w tej instrukcji pozwoli na bezpieczne korzystanie z wyrobu, a także przedłuży jego trwałość oraz estetykę.



1. PRZEZNACZENIE INSTRUKCJI



Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje niezbędne do prawidłowego: przygotowania wózka przed użytkowaniem, użytkowania wózka, sposobu konserwacji i czyszczenia.

Podręcznik ten należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu. Instrukcja przeznaczona jest dla osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi oraz lekarzy i fizjoterapeutów obsługujących urządzenie.

Przed przystąpieniem do użytkowania wózka **OMBRELO™** użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszej instrukcji.

2. WSKAZANIA I PRZECIWSKAZANIA DO STOSOWANIA WYROBU

Wyrób medyczny przeznaczony dla osób ze schorzeniami ortopedycznymi, neurologicznymi, kardiologicznymi oraz osób po zabiegach operacyjnych, ze znacznymi dysfunkcjami narządu ruchu, które nie nabyły umiejętności samodzielnego siedzenia lub mają znaczne trudności z przyjęciem i utrzymaniem pozycji siedzącej.

Zarówno dla osób bardzo wiotkich ze zmniejszonym napięciem mięśniowym, jak i dla osób, u których występuje spastyczność. Wyrób może być również bardzo przydatny u osób wymagających długotrwałego odciążenia jednej, lub obu kończyn dolnych. Wyrób stanowi niezastąpioną pomoc w procesie rehabilitacji zarówno w aspekcie ruchowym jak i w integracji społecznej. Doskonale sprawdza się podczas terapii i zabawy, a także innych codziennych aktywności takich jak nauka czy spożywanie posiłków. Dobór odpowiedniego rozmiaru wyrobu zależy od wskazań medycznych i parametrów anatomicznych niezależnie od wieku użytkownika.

Wyrób zalecany jest dla osób, u których rozpoznano:

- Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – różne postacie,
- Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów,
- Zaawansowane choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane – SM, stwardnienie zanikowe boczne – SLA i inne),
- Przepuklinę oponowo-rdzeniową,
- Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami (dystrofie, miastenia, zapalenie wielomięśniowe),
- Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn dolnych,
- Choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne stawów,
- Inne choroby przebiegające z niedowładami, porażeniami, uszkodzeniami w zakresie narządu ruchu,
- Po urazach, przeżytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami cztero kończynowymi.

Przeciwwskazania:

- Stan krytyczny pacjenta,
- Paraliż,
- Głęboka sedacja,
- Niestabilne złamania z określonymi zaleceniami ortopedycznymi, w tym złamania kręgosłupa,
- Nieleczona zakrzepica żył głębokich,
- Niestabilność hemodynamiczna,
- Stwierdzone zaburzenia czynności mózgu podczas siedzenia w pozycji wyprostowanej,
- Ciężkie zapalenie stawów kręgosłupa szyjnego,
- Zatorowość płucna,
- Świeży zawał mięśnia sercowego w ciągu ostatnich 24 godzin,
- Świeże rany pooperacyjne lub niegojące się rany w obrębie pleców, okolic obręczy miedniczej, stawów biodrowych oraz ud,
- Użytkownicy z zaburzeniami psychicznymi nie powinni być pozostawieni w wyrobie bez nadzoru opiekuna.



3. OGÓLNA BUDOWA WÓZKA

3.1. Wyposażenie standardowe


1. Rama składana w formę parasolki
2. Przednie koła skrętne wykonane z tworzywa zbrojonego włóknami szklanymi z pełnymi oponami
3. Tylne koła łożyskowane wykonane z tworzywa zbrojonego włóknami szklanymi wyposażone w pompowane opony dętkowe
4. Niezależne podnóżki FlipFlap™ z funkcją regulacji wysokości, przywiedzenia i odwiedzenia stopy, 5-punktowe pasy stabilizujące stopy
5. Pasy 5-punktowe
6. Regulowany zagłówek
7. Oparcie z regulacją wysokości
8. Siedzisko z regulacją głębokości
9. Rączka wózka
10. Podparcie głowy
11. Hamulec
12. Uchwyty TransFix™
13. Tapicerka Comfort



WIDOK WÓZKA Z TYŁU



BUDOWA PODNÓŻKA

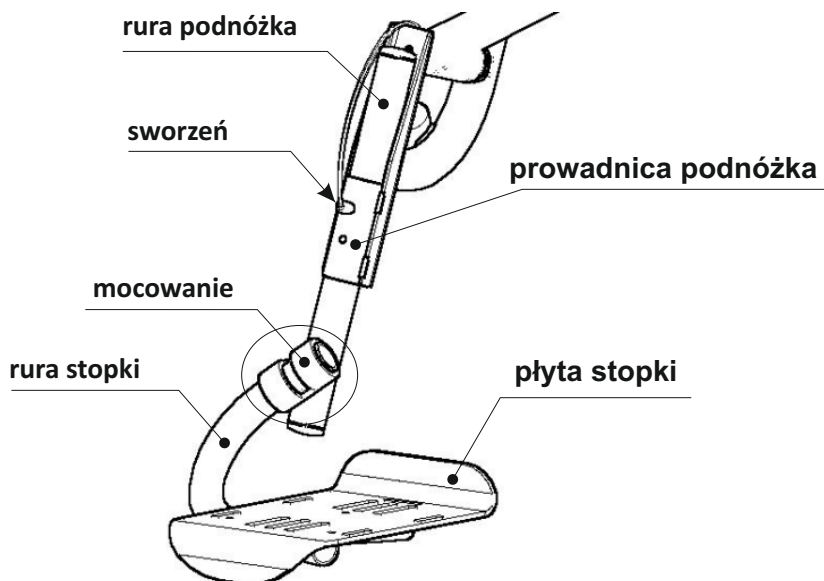

3.2 AKCESORIA


OMO_001
Światła LED


OMO_002
Pas do przenoszenia chorych AM-P

OMO_012
Pas bezpieczeństwa



OMO_013
Barierka


OMO_101
Pasy odwodzące uda

OMO_107
Pas biodrowy

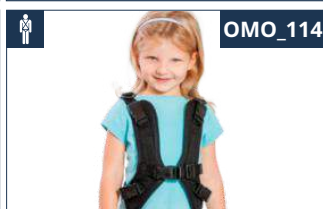
OMO_113
Pas stabilizujący tułów

OMO_114
Kamizelka H

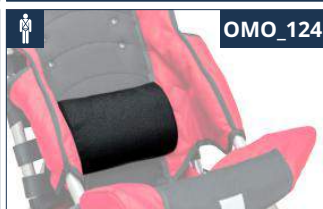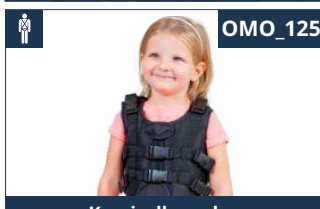OMO_115
Pas łydkowy

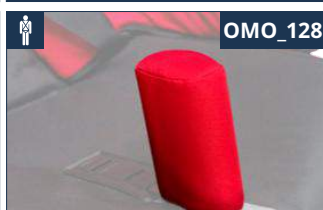OMO_121
Zagłówek z podparciem głowy

OMO_124
Pelota lędźwiowa

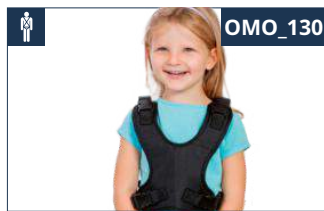OMO_125
**Kamizelka pełna
6-punktowa**

OMO_126
Pas tułowia

OMO_128
Klin międzyudowy

OMO_129
Pasy odwodząco-stabilizujące uda



OMO_130

Kamizelka 4-punktowa



OMO_132

Zagłówek Elastico



OMO_135

Boczne peloty sztywne



OMO_136

Pas udowy



OMO_160

Anatomiczny zagłówek z podparciem głowy OCTAGON



OMO_162

Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22)



OMO_402

Parasolka



OMO_403

Stolik



OMO_405

Daszek bez osłon bocznymi



OMO_408

Osłona przeciwdeszczowa



OMO_411

Uchwyt na kubek




OMO_412

Poduszka Elastico siedziska



OMO_413

Poduszka Elastico oparcia

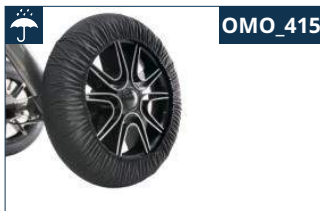

OMO_415

Osłony na koła (4 szt.)





OMO_416

Śpiwór letni





4 TABELA WYMIAROWA

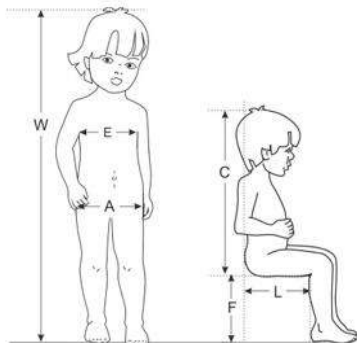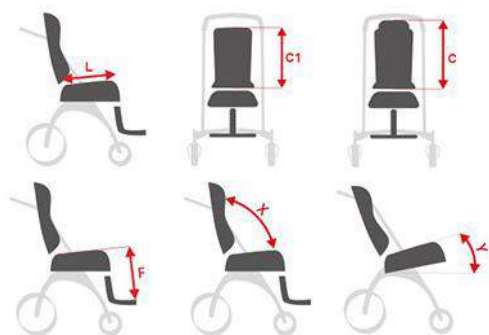

Symbol	Pomiar	Jednostka	Rozmiar 2	Rozmiar 3	Rozmiar 4	Rozmiar 5
W	orientacyjny wzrost użytkownika*	[cm]	100 - 130	100 - 150	120 - 180	130 - 180
A/E	szerokość siedziska/oparcia	[cm]	29	34	39	43
L	głębokość siedziska	[cm]	28 - 36	27 - 38	27 - 38	35 - 42
C	wysokość oparcia (z zagłówkiem)	[cm]	46 - 72	46 - 72	53 - 76	54 - 80
F	długość podnóżków	[cm]	16 - 64	16 - 64	16 - 64	16 - 64
C ₁	wysokość oparcia (bez zagłówka)	[cm]	58	55	63	60
	długość stopki	[cm]	20	21	23	23
	wysokość rączek prowadzących	[cm]	100 - 105	100 - 105	100 - 105	100 - 105
X	kąt pochylenia oparcia	[°]	90	90	90	90
Y	kąt pochylenia siedziska	[°]	30	30	30	30
	max. waga użytkownika	[kg]	45	55	75	120

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

*Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.

Wymiary i waga sprzętu	Jednostka	Rozmiar 2	Rozmiar 3	Rozmiar 4	Rozmiar 5
Szerokość	[cm]	57	63	67	72
Długość	[cm]	125	130	137	137
Wysokość	[cm]	101	104	101	108
Szerokość po złożeniu	[cm]	36	35	36	34
Długość po złożeniu	[cm]	130	133	133	130
Wysokość po złożeniu	[cm]	45	42	46	39
Waga	[kg]	18,5	18,5	20	20,5

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.

5 OPIS MONTAŻU WÓZKA

Ze względów transportowych, dostarczany do Państwa wózek wymaga montażu.

Aby móc użytkować wózek należy:

KROK 1. Zamontować podparcie głowy (**patrz punkt 6.5.1, strona 22**);

KROK 2. Zamontować podnóżek (**patrz punkt 6.4.1, strona 18**).

6 SZCZEGÓŁOWY OPIS OBSŁUGI WÓZKA

6.1. Składanie wózka

Aby złożyć wózek należy:

KROK 1. Wymontować podparcie głowy (**patrz punkt 6.5.1, strona 22**);

KROK 2. Złożyć podnóżki wózka poprzez pociągnięcie ich na zewnątrz wózka aż do oporu (fot. 1);



fot.2




fot.1

KROK 3. Podnieść do góry rozpórkę dolną znajdującą się przy kołach. Rozpórkę górną (w przypadku rozmiaru od 2 do 5) znajdującą się za oparciem należy przesunąć w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara aż do oporu (fot.2).



KROK 4. Jedną ręką złapać za rączkę wózka (9), drugą za ramę siedziska i mocno pociągnąć je do siebie do całkowitego złożenia wózka (fot. 3, 4, 5).

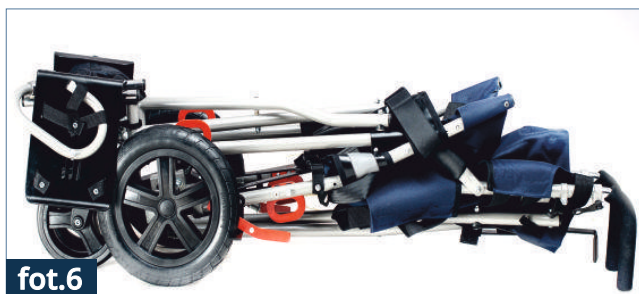

Na stronie internetowej www.akces-med.com znajduje się animacja przedstawiająca dokładny sposób składania wózka OMBRELO

Aby móc transportować wózek należy po złożeniu spiąć go pasami, które zabezpieczają przed samoczynnym rozłożeniem się wózka(fot. 7).





UWAGA! Podczas składania i rozkładania wózka należy zachować szczególną ostrożność, aby nie przycisnąć palców między ramami stelaża wózka!

6.2. Rozkładanie wózka

Aby rozłożyć wózek należy:

KROK 1. Rozpiąć klamrę zabezpieczającą przed samoczynnym rozłożeniem się wózka (fot. 8);

KROK 2. Ustawić koła wózka na równym podłożu a następnie mocno pchnąć ramę siedziska i ramę oparcia na zewnątrz wózka aż do całkowitego rozłożenia wózka (fot. 9);

KROK 3. Wcisnąć do dołu rozpórkę dolną znajdującą się przy kołach. Rozpórkę górną (w przypadku rozmiaru od 2 do 5) znajdującą się za oparciem należy przesunąć w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara aż do oporu (fot. 10);

KROK 4. Rozłożyć podnóżki (4) poprzez pociągnięcie ich w kierunku do wewnątrz wózka aż do oporu (fot. 11).





UWAGA! Przed użyciem wózka należy upewnić się, czy wszystkie rozporki zabezpieczające prze samoczynnym złożeniem się wózka są we właściwych pozycjach!

6.3.Koła, Hamulec

Wózek posiada niezależną blokadę każdego koła tylnego

6.3.1. Aby aktywować hamulec należy pociągnąć czerwoną dźwignię znajdującą się przy kole do tyłu (fot. 12). Czynność należy powtórzyć przy drugim tylnym kole.



6.3.2. Koła odblokowuje się poprzez pociągnięcie czerwonych dźwigni do przodu (fot.13).

6.3.3. Istnieje możliwość zwiększenia nacisku dźwigni hamulca na oponę koła poprzez regulację nakrętki, wkręcającej lub wykręcającej za pomocą klucza (fot. 14).



fot.13



fot.14



UWAGA! Zalecane ciśnienie w oponach - 1,5 Bar.



Nie zaleca się demontażu kół tylnych jeżeli nie ma takiej wyraźnej konieczności. Jeżeli jest taka potrzebna, to po ponownym zamontowaniu koła, śrubę z drugiej strony należy zabezpieczyć nakrętką z dodatkiem kleju do gwintów, średniowytrzymałym. Wymiana dętki nie wymaga demontażu kół tylnych!

6.4. Podnóżek

6.4.1 Aby zamontować podnóżek należy włożyć rurę podnóżka w prowadnicę podnóżka a następnie zabezpieczyć sworznem na wybranej wysokości (fot. 15, 16).



6.4.2 Aby złożyć podnóżki należy postępować zgodnie z instrukcją opisaną w punkcie 6.1, krok 2.

6.4.3 Aby rozłożyć podnóżek należy postępować zgodnie z instrukcją opisaną w punkcie 6.2, krok 4.

6.4.4. Regulacja długości podnóżka.

Istnieją trzy możliwe konfiguracje ustawienia długości

I KONFIGURACJA

Aby regulować długość podnóżka należy wyjąć sworzni, dopasować długość podnóżka wedle uznania i włożyć sworzni w odpowiedni otwór w prowadnicy podnóżka (fot. 17).



II KONFIGURACJA

W przypadku, gdy zakres regulacji podnóżka nie jest wystarczający należy:

KROK 1. Nacisnąć przycisk znajdujący się na rurze stopki a następnie wyjąć stopkę z mocowania (fot. 18).



KROK 2. Wyjąć rurę podnóżka, zamontować ją na prowadnicy podnóżka odwrotnie (tak, by mocowanie znajdowało się na górze) i zabezpieczyć sworzniem na wybranej wysokości (fot. 19).

KROK 3. Zamontować stopki poprzez wciśnięcie przycisku przy rurze stopki i umieszczenie jej w mocowaniu na rurze podnóżka (fot. 20).



III KONFIGURACJA

Możliwe jest także całkowite podwyższenie podnóżka, jeżeli regulacja opisana w punkcie 1 i 2 nie jest wystarczająca. W tym celu należy odkręcić śruby mocujące prowadnicę podnóżka, w którą włożona jest rura podnóżka (fot.21), zamocować ją ponownie w odwrotnej pozycji, tak jak przedstawiono na zdjęciu (fot. 22) a następnie postępować zgodnie z instrukcją opisaną w **punkt 6.4.4, II KONFIGURACJA, KROK 1-3, strona 19.**



6.4.5. Płyta stopki może być regulowana na boki oraz w górę i w dół. W tym celu należy wykręcić śruby znajdujące się pod stopką, zmienić położenie płyty stopki i ponownie przykręcić śruby (fot. 23).



6.4.6. Podnózek wyposażony jest w paski umożliwiające stabilizację stopy pacjenta. Paski stabilizujące stopy zapinane są „na krzyż” (fot. 24, fot. 25) lub obwodowo wokół kostki (fot. 26).



fot.24



fot.25



fot.26

6.5. Podparcie głowy

6.5.1. Aby zamontować podparcie głowy należy włożyć jego ramy w rury oparcia znajdującą się z tyłu oparcia (fot. 27).



fot.27

6.5.2. Wysokość podparcia głowy reguluje się za pomocą nakładek gumowych założonych na ramy (fot. 28, 29).



fot.28



fot.29

6.5.3. Wysokość ustawienia zagłówka na podparciu głowy można regulować dzięki paskom z rzepami zapinanymi z tyłu podparcia głowy (fot. 30).



fot.30

6.6. Zagłówek

Zagłówek można montować bezpośrednio na oparciu wózka lub na podparciu głowy

6.6.1. Aby zamontować zagłówek bezpośrednio na oparciu wózka należy wymontować podparcie głowy, rozsznurować wiązanie z tyłu i wyjąć zagłówek (fot.31). Zagłówek można zamocować na oparciu wózka na dowolnej wysokości za pomocą pasków z rzepami zapinanych z tyłu oparcia (fot. 32, 33).



fot.31



fot.32



fot.33

6.7. Siedzisko

6.7.1. Istnieje możliwość regulacji głębokości siedziska. W tym celu należy:

KROK 1. Zwolnić rozpórki wózka (patrz punkt 6.1, krok 3, strona 13) i nieznacznie złożyć ramy wózka (patrz punkt 6.1, krok 4, strona 14) co ułatwi regulację głębokości siedziska.

KROK 2. Wcisnąć jednocześnie przyciski znajdujące się po obydwu stronach ramy siedziska (fot. 34);



KROK 3. Wyjąć ramy siedziska ze stelaża wózka i włożyć je ponownie w odpowiednie otwory (fot. 35);

Ważne, aby ramy siedziska zostały równo włożone w stelaż wózka



KROK 4. Rozłożyć wózek i wcisnąć do dołu rozpórkę dolną i przesunąć rozpórkę górną aż do całkowitego rozłożenia się wózka (**patrz punkt 6.2, krok 2, 3, str. 15**).

6.8. Pasy 5-punktowe


Wózek wyposażony jest w pasy 5-punktowe, które stabilizują pacjenta i zabezpieczają go przed wypadnięciem z wózka.

6.8.1. Aby zamontować pasy 5-punktowe należy:

KROK 1. Włożyć końcówki pasów w otwory w tapicerce oparcia, na wybranej wysokości. Następnie należy zabezpieczyć je pokrętłem z drugiej strony (fot. 36).




KROK 2. Aby zamocować pasy w dolnej części oparcia należy przepleść paski przez trójkątne mocowanie znajdujące się przy ramie wózka (fot.37) a następnie wsunąć końce paszków w regulator (fot.38).

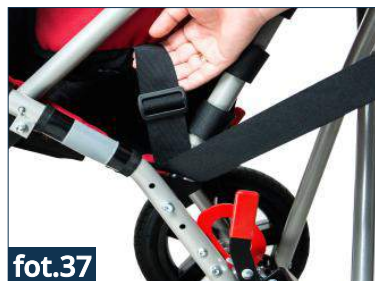

KROK 3. Aby zamontować pasy 5-punktowe na siedzisku należy przepleść pasek przez plastikowe mocowanie znajdujące się na poduszce.



UWAGA! Pasek powinien być przepleciony przez plastikowe mocowanie trzykrotnie! Schemat montażu poniżej.

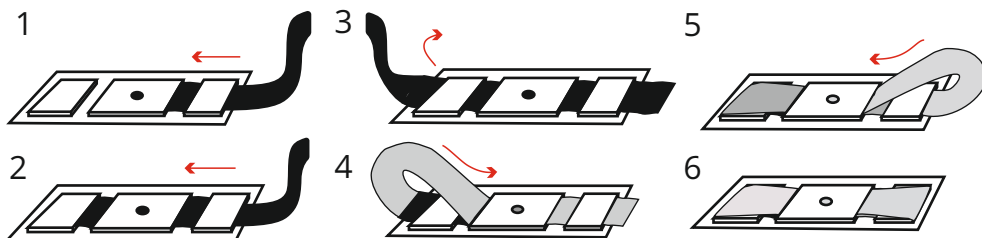

6.8.2. Aby zapiąć pasy 5-punktowe należy:

KROK 1. Połączyć zapięcia pasów (fot. 40);

KROK 2. Włożyć zapięcia pasów w klamrę zamocowaną przy siedzisku (fot. 41).



fot.40



fot.41

6.8.3. Możliwa jest regulacja wysokości mocowania pasów na oparciu. W tym celu należy odkręcić pokrętła znajdujące się z tyłu oparcia, ustawić pasy na wybranej wysokości i dokręcić pokrętła (fot. 42).



fot.42

6.8.4. Demontaż pasów 5-punktowych jest możliwy po odkręceniu pokręteł z tyłu oparcia oraz wyciągnięciu pasków z klamer i z uchwytu znajdującego się na tapicerce siedziska.



UWAGA! Każdorazowo przed użyciem pasów 5-punktowych należy sprawdzić czy:

- klamry nie ulegają rozpięciu pod siłą nacisku,
- klamry i paski nie przesuwają się w wyniku niewłaściwego zamontowania.



Przed korzystaniem z pasów należy bezwzględnie zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa zawartymi w instrukcji. Informacje o tym, jak bezpiecznie korzystać z kamizelki, znajdują się na stronie 63 instrukcji. Niewłaściwe użytkowanie oraz nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może zagrażać zdrowiu i życiu użytkownika.

7 MONTAŻ WYPOSAŻENIA PONADSTANDARDOWEGO

7.1 **REF OMO_402** Parasolka

Aby zamontować parasolkę należy poluzować zacisk parasolki, umieścić go na ramie rączki wózka, następnie ustawić odpowiednią pozycję i dokręcić pokrętko (fot.46). Ustawienie parasolki można regulować poprzez przycisk znajdujący się przy zacisku (fot.47).



fot.45



fot.46



fot.47

7.2 **REF OMO_505** Kosz pod siedzisko

Kosz pod siedzisko montowany jest na ramie stelaża pod siedziskiem za pomocą pasków z zatrzaskami (fot. 49). Zalecany jest montaż kosza na stelażu nad uchwytyami TransFix™.



7.3. **REF OMO_126** Pas tułowia

Pas biodrowy można w łatwy sposób przyciąć na dowolną długość. W tym celu należy:

KROK 1. Rozpiąć pas z tyłu (fot.54).



KROK 2. Wybrać odpowiednią długość pasa i przyciąć go w miejscu do tego wyznaczonym (fot.55, 56).



KROK 3. Następnie należy spiąć końce pasa za pomocą specjalnej zapinki na rzepcy (fot.57). Pas zapina się na wózku wokół oparcia (fot.58).



7.4 **REF OMO_128** Klin międzyudowy

Aby zamontować klin międzyudowy należy:

KROK 1. Wymontować pasy 5-punktowe dołączone do wyposażenia standardowego wózka (**patrz punkt 6.8.4, strona 27**);

KROK 2. Włożyć listwę klina w uchwyt znajdujący się na tapicerce siedziska wózka (fot. 59);

KROK 3. Klin należy przymocować do siedziska za pomocą śruby przykręcającej kluczem imbusowym (fot. 60).



7.5 REF OMO_405 Daszek

Aby zamontować daszek należy:


KROK 1. Nałożyć otwory w tapicerce daszka na rączki wózka (fot. 62).

KROK 2. Umieścić zaczepy daszka na ramie wózka (fot. 63, 64).



KROK 3. Rozłożyć budkę daszka i zablokować napinacze znajdujące się po obu stronach budki (fot. 65).

KROK 4. W budce daszka znajduje się okienko, które można odsłonić aby móc obserwować dziecko siedzące w wózku. W tym celu należy odsunąć zamek znajdujący się na budce daszka i nałożyć materiał na budkę (fot. 66, 67).

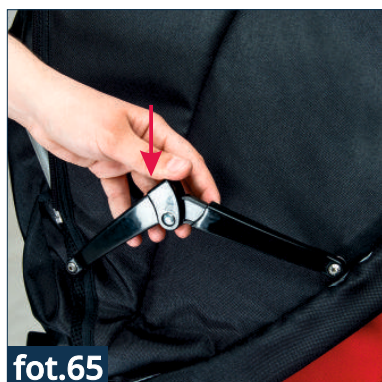



7.7 REF OMO_420 Daszek z osłonami bocznymi

Daszek z osłonami bocznymi montuje się tak samo jak daszek bez osłon. W przypadku daszka z osłonami należy dodatkowo zamontować osłony boczne poprzez umieszczenie zacisków osłon na ramie stelaża wózka przy tylnym kole (fot. 69).



Ostony można całkowicie wypiąć, rozsuwając zamek znajdujący się przy budce daszka (fot. 70).



Istnieje możliwość zwinięcia zewnętrznych osłon tak, by pozostawić po bokach przewiewną siatkę. W tym celu należy:

KROK 1. Odpiąć zatrzask znajdujący się na dole osłony (fot. 71);



KROK 2. Zwinąć zewnętrzną osłonę (fot.72)

KROK 3. Zamocować ją przy budce daszku (fot.73).



Daszek posiada z tyłu kieszonkę zapinaną na rzepy (fot.74).



7.8 **REF OMO_411** Uchwyt na kubek

Aby zamontować kubek należy:

KROK 1. Poluzować zacisk i umieścić go na ramie rączki wózka (fot.75);

KROK 2. Dokręcić pokrętko (fot. 76);

KROK 3. Ustawić odpowiednią pozycję kubka za pomocą przycisku (fot. 77).



7.9 REF OMO_408 Osłona przeciwdeszczowa

Osłona przeciwdeszczowa zakładana jest na wózek, na którym wcześniej zamontowano daszek z osłonami bądź też bez osłon bocznych. Aby zamontować osłonę przeciwdeszczową należy:

KROK 1. Nałożyć otwory w osłonie na rączki wózka i naciągnąć osłonę na daszek i cały wózek (fot. 80);



fot.80



fot.79

KROK 2. Zamocować osłonę na ramie wózka z tyłu przy uchwycie TransFix™ (fot. 81) oraz z przodu przy podnóżku za pomocą pasków z rzepami (fot. 82).



fot.81



fot.82



7.10. **REF OMO_113** Pas stabilizujący tułów

Aby założyć pas stabilizujący tułów na wózek należy:

KROK 1. Włożyć paski podtrzymujące pas w otwory znajdujące się w tapicerce oparcia wózka (fot. 83, 84). Można regulować wysokość położenia pasa tułowia poprzez włożenie pasków w odpowiednie otwory w tapicerce. Paski należy zapiąć na rzep z tyłu oparcia.



KROK 2. Przełożyć boczne paski przez ramę stelaża wózka (fot. 85) a następnie wsunąć je w regulator (fot. 86). Pas powinno się dopasować do szerokości tułowia użytkownika. Czynność należy powtórzyć z drugiej strony wózka.



KROK 3. Przełożyć pasek zamykający pas tułowia przez uchwyt. W zależności od szerokości tułowia można wykorzystać krótszy lub dłuższy pasek z uchwytem (fot. 87).




fot.87


KROK 4. Zamknięcie pasa tułowia następuje po wsunięciu paska w regulator i zapięciu go na rzep (fot. 88, 89).


fot.88

fot.89

7.11. **REF|OMO_121** Zagłówek z podparciem głowy

Zagłówek z podparciem głowy montowany jest na oparciu wózka za pomocą pasków z rzepami. Paski zagłówek powinny obejmować ręczki wózka i zapinać się za oparcie (fot. 90).


fot.90

7.12. **REF OMO_115** Pas łydkowy

Pas łydkowy montowany jest na podnóżkach nad stopkami (fot.91). Aby go zamontować należy zapiąć paski z rzepem w taki sposób aby obejmowały one prowadnicę podnóżka (fot.92,93). Pas łydkowy może być zamontowany jedynie przy ustawieniu podnóżka w I konfiguracji (patrz punkt 6.4.4, I KONFIGURACJA, strona 18).



fot.91



fot.92



fot.93

7.13. **REF OMO_508** Torby boczne

Torby boczne montowane są na ramie wózka przy siedzisku. Aby założyć torbę należy przełożyć paski torby przez ramę (fot.95) a następnie zapiąć dwa zatrzaski (fot.96). Torba posiada z przodu kieszonkę z przewiewnej siatki oraz elementy odblaskowe.



fot.94



fot.95



fot.96

7.14. **REF OMO_403** Stolik

Aby zamontować stolik należy:

KROK 1. Nałożyć zaczepy stolika na elementy umieszczone na stelażu oparcia wózka (fot.97, 98).



KROK 2. Podnieść tapicerkę oparcia i jednocześnie nałożyć uchwyty stolika na stelaż oparcia i docisnąć (fot.99,100).



KROK 1. Aby regulować głębokość stolika należy poluzować pokrętkę, ustawić żądaną głębokość stolika, mocno dokręcić pokrętkę (fot.101,102)



7.15. **REF OMO_412** Poduszka Elastico siedziska

Aby zamontować poduszkę Elastico siedziska należy:

KROK 1. Położyć poduszkę na siedzisku wózka

KROK 2. Przełożyć paski mocujące poduszkę przez stelaż siedziska (fot. 103,104) a następnie zapiąć na rzepy pod siedziskiem wózka (fot. 105). Czynność powtarzamy w przypadku drugiej pary pasków mocujących poduszkę. Ważne! Paski mocujące muszą obejmować stelaż siedziska!



fot.103



fot.103



fot.104

Sposób montażu pasów 5-punktowych został opisany w podpunkcie 6.8.1 (**patrz 6.8.1, strona 24**).



7.16 **REF OMO_413** Poduszka Elastico oparcia

Poduszka Elastico oparcia składa się z 4 osobnych poduszek różnej wielkości. Umożliwia to ich montaż na wózku w różnych konfiguracjach, w zależności od tego, jaką wysokość ustawienia pasów 5-punktowych chcemy uzyskać.





fot.105

KROK 1. Każdą z trzech poduszek o kształcie prostokątnym należy ułożyć na oparciu a następnie włożyć jej paski mocujące w odpowiednie otwory w tapicerce (fot. 106, 107)

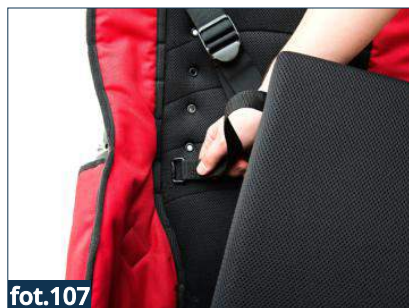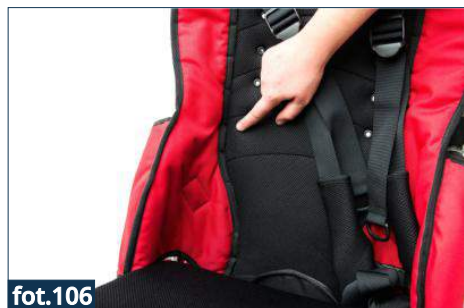


KROK 2. Następnie pasy należy zapiąć na rzep za oparciem wózka (fot. 108,109).
Ważne! Paski mocujące muszą obejmować stelaż oparcia!

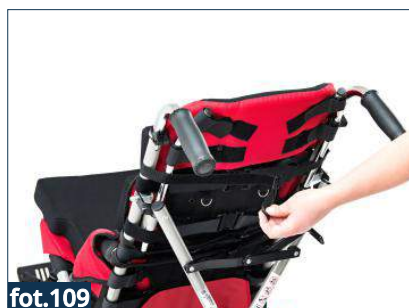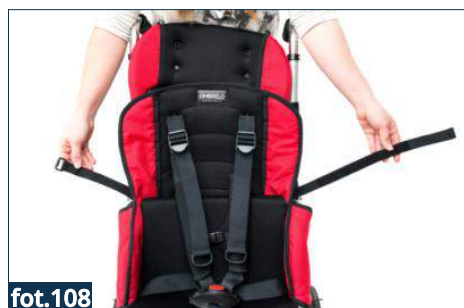

KROK 3. Ostatnia czwarta poduszka posiada specjalny kształt, umożliwiającą montaż zagłówka. Poduszkę należy ułożyć na podparciu głowy, które posiada specjalne otwory (fot. 110, 111)



Następnie należy włożyć sznurówki zagłówka w otwory i zawiązać je za podparciem głowy (fot.112).

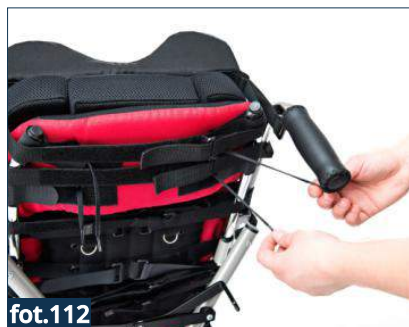

fot.112

7.17. **REF OMO_124** Pelota lędźwiowa

Aby zamontować pelotę lędźwiową należy:

KROK 1. Położyć pelotę na oparciu wózka i przewlec paski mocujące pelotę przez otwory w tapicerce oparcia (fot. 113, 114)



fot.113




fot.114

KROK 2. Zapiąć paski mocujące na rzepy za oparciem wózka. Czynność powtarzamy w przypadku drugiej pary pasków mocujących pelotę (fot.115, 116).

Ważne! Paski mocujące muszą obejmować stelaż oparcia!



fot.115

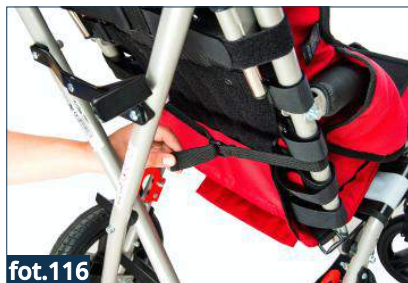

fot.116



7.18. **REF OMO_507** Pokrowiec na butlę tlenową

Aby zamontować pokrowiec na butlę tlenową należy:
KROK 1. Wypiąć dwa paski z klamer znajdujących się przy pokrowcu.

KROK 2. Wysunąć z paska klamerę oraz regulator 2, pozostawiając na pasku regulatora 1 (fot.117, 118).



fot.118



fot.117


KROK 3. Przełożyć jeden z pasków przez rączkę wózka (fot. 119) a następnie koniec paska przepleść przez regulator 1 (fot. 120). Następnie należy przepleść pasek przez regulator 2 (fot. 121).



fot.119



fot.120

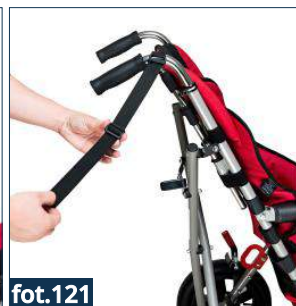

fot.121

KROK 5. Następnie na pasek założyć klamerę i przepleść przez nią pasek zgodnie z przedstawionym poniżej sposobem (fot. 122, 123). Koniec paska należy wsunąć w regulator 2. Drugi z pasków należy zamocować na ramie bocznej zgodnie z instrukcją opisaną w krokach 2-5 (fot.124)



fot.122



fot.123



fot.124






KROK 7. Do tak zamocowanych pasków można przypiąć pokrowiec z butlą (fot.125, 126). W razie potrzeby, długość pasków można regulować.




fot.125

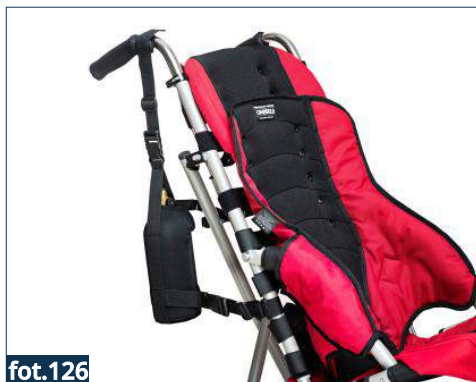

fot.126

- 7.19. **REF OMO_114** Kamizelka H
REF OMO_130 Kamizelka 4-punktowa

Kamizelki pełnią funkcję stabilizatora tułowia. Posiadają duży zakres regulacji oraz funkcję szybkiego dopasowania do ciała pacjenta za pomocą systemu CHWYĆ I POCIĄGNIJ®. Kamizelki montuje się na wózku w taki sam sposób jak standardowe pasy 5-punktowe (**patrz punkt 6.8.1, strona 24**).

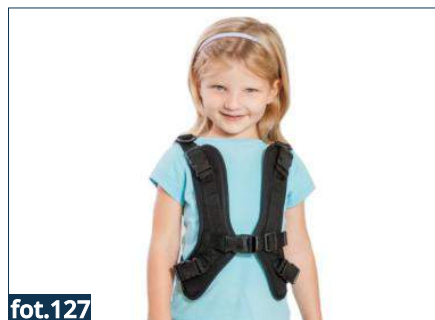

fot.127



fot.128



Przed korzystaniem z kamizelki należy bezwzględnie zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa zawartymi w instrukcji. Informacje o tym, jak bezpiecznie korzystać z kamizelki, znajdują się na stronie 63 instrukcji. Niewłaściwe użytkowanie oraz nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może zagrażać zdrowiu i życiu użytkownika.






7.20. **REF OMO_125** Kamizelka pełna 6-punktowa

Pełni funkcję stabilizatora tułowia. Posiada duży zakres regulacji. Dodatkowo posiada funkcję szybkiego dopasowania do ciała za pomocą systemu CHWYĆ I POCIĄGNIJ®.

Aby zamontować kamizelkę 6-punktową należy:

KROK 1. Włożyć ją na pacjenta a następnie zapiąć zamek błyskawiczny i klamrę z przodu kamizelki (fot.128-131);

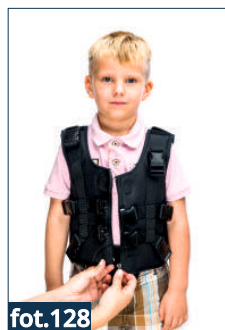

fot.128



fot.129



fot.130



fot.131

KROK 2. Dopasować kamizelkę poprzez regulację rzepów znajdujących się z tyłu kamizelki (fot.132, 133);



fot.132



fot.133

KROK 3. Kamizelkę montuje się na wózku w taki sam sposób jak standardowe pasy 5-punktowe (**patrz punkt 6.8.1., strona 24**). Dodatkowo należy zapiąć pas obwodowym, który należy przełożyć za oparcie wózka i zapiąć z przodu kamizelki (fot.134).



fot.134



Przed korzystaniem z kamizelki należy bezwzględnie zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa zawartymi w instrukcji. Informacje o tym, jak bezpiecznie korzystać z kamizelki, znajdują się na stronie 63 instrukcji. Niewłaściwe użytkowanie oraz nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może zagrażać zdrowiu i życiu użytkownika.



7.21. **REF OMO_417** Śpiwór zimowy

Aby założyć śpiwór zimowy na wózek należy:

KROK 1. Przygotować wózek - wyjąć podnóżki wózka postępując w odwrotnej kolejności jak w przypadku ich montażu (**patrz punkt 6.4, strona 18**).

KROK 2. Rozpiąć zamek błyskawiczny śpiwora i rozłożyć go na siedzisku i oparciu wózka.

KROK 3. W dolnej części śpiwora znajdują się dwa otwory. Należy w nie włożyć prowadnice podnóżków (fot.135) a następnie zamontować podnóżki (fot.136) i zabezpieczyć je sworzniem na wybranej wysokości (fot.137) (**patrz punkt 6.4, strona 18**).



KROK 4. Dodatkowo śpiwór należy przymocować do podnóżka za pomocą paska zapinanego na zatrzask wokół rury stopki (fot.138)



KROK 5. Śpiwór posiada specjalny otwór na pasy 5-punktowe oraz na klin. W pierwszej kolejności należy rozpiąć pasy 5-punktowe i całkowicie wyciągnąć dwa dolne paski (będące częścią 5-punktowych pasów) z trójkątnego mocowania znajdującego się przy ramie wózka (fot.139).



KROK 6. Następnie należy nałożyć śpiwór na oparcie wózka a przez otwór śpiwora znajdujący się na środku siedziska przełożyć zapięcie pasów 5-punktowych (fot.140). Dwa dolne paski będące częścią pasów 5-punktowych należy przełożyć przez otwory znajdujące się z boku śpiwora (fot.141).



KROK 7. Obydwa paski powinny być zamocowane do wózka. W tym celu należy przepleść pasek przez trójkątne mocowanie znajdujące się przy ramie wózka (fot.142) a następnie wsunąć końcówkę paska w regulator (fot.143, 144).



KROK 8. Tak zamontowane pasy 5-punktowe można zapiąć (fot.145). Należy upewnić się, czy pasy zostały zamontowane poprawnie, pociągając za nie.



fot.145



fot.146

KROK 9. Ostatnim krokiem jest zamocowanie śpiwora na oparciu. W tym celu należy przepleść paski mocowania śpiwora znajdujące się przy jego górnej części przez otwory w tapicerce (fot. 146, 147, 148) a następnie zapiąć je na rzep za oparciem (fot.149). **WAŻNE! Paski powinny obejmować ramy oparcia wózka!**




fot.146



fot.147



fot.148

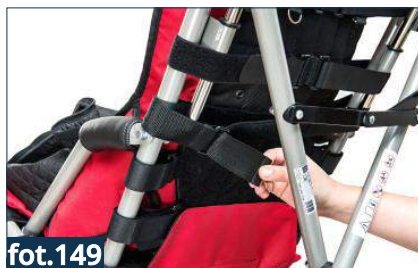

fot.149




7.22. **REF OMO_416** Śpiwór letni

Aby założyć śpiwór letni na wózek należy:

KROK 1. Przygotować wózek - wyjąć podnóżki wózka postępując w odwrotnej kolejności jak w przypadku ich montażu (**patrz punkt 6.4, strona 18**).

KROK 2. Rozpiąć zamek błyskawiczny śpiwora i rozłożyć go na siedzisku i oparciu wózka.

KROK 3. W dolnej części śpiwora znajdują się dwa otwory. Należy w nie włożyć prowadnice podnóżków (fot.150) a następnie zamontować podnóżki (fot.151) i zabezpieczyć je sworzniem na wybranej wysokości (fot.152) (**patrz punkt 6.4, strona 18**).

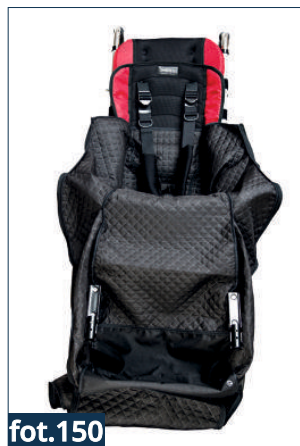

fot.150



fot.151



fot.152

KROK 4. Dodatkowo śpiwór należy przymocować do podnóżka za pomocą paska zapinanego na zatrzask wokół rury stopki (fot.153, 154)



fot.153



fot.154



KROK 5. Śpiwór posiada specjalny otwór na pasy 5-punktowe oraz na klin. W pierwszej kolejności należy rozpiąć pasy 5-punktowe i całkowicie wyciągnąć dwa dolne paski (będące częścią 5-punktowych pasków) z trójkątnego mocowania znajdującego się przy ramie wózka (fot.155).



fot.155

KROK 6. Następnie należy nałożyć śpiwór na oparcie wózka a przez otwór śpiwora znajdujący się na środku siedziska przełożyć zapięcie pasów 5-punktowych. Dwa dolne paski będące częścią pasów 5-punktowych należy przełożyć przez otwory znajdujące się z boku śpiwora (fot.156).



fot.156

KROK 7. Obydwa paski należy zamocować do wózka. W tym celu należy przepleść pasek przez trójkątne mocowanie znajdujące się przy ramie wózka (fot.157) a następnie wsunąć końcówkę paska w regulator (fot.158, 159).



fot.157



fot.158



fot.159

KROK 8. Następnie należy zapiąć pasy 5-punktowe (fot.160). Należy upewnić się, czy pasy zostały zamontowane poprawnie, pociągając za nie.

KROK 9. Ostatnim krokiem jest zamocowanie śpiwora na oparciu. W tym celu należy przepleść paski śpiwora znajdujące się przy jego górnej części przez otwory w tapicerce (fot.161-165) a następnie zapiąć ich na rzep za oparciem (fot.166). **WAŻNE! Paski powinny obejmować ramy oparcia wózka!**



fot.160



fot.161



fot.162



fot.163



fot.164



fot.165



fot.166



7.23. **REF OMO_135** Boczne peloty sztywne

Aby zamontować peloty boczne sztywne należy:

KROK 1. Na peloty nałożyć tapicerkę. Należy zwrócić uwagę na oznaczenia - na pelotę prawą nakładamy tapicerkę oznaczoną metką z napisem „Prawa”, analogicznie postępujemy w przypadku peloty lewej. Ważne jest także, aby tapicerka została nałożona na pelotę zgodnie z przedstawionym obok przykładem (fot.167).



KROK 2. W celu montażu pelot należy w pierwszym kroku odpiąć rzep tapicerki oparcia (fot.168) a następnie nałożyć peloty na ramę oparcia tuż nad siedziskiem wózka za pomocą dwóch zaczepów (fot.169) i zapiąć tapicerkę. Pelotę należy zamocować w taki sposób aby jej zgięcie było skierowane do zewnątrz wózka. Prawą pelotę należy zamontować po prawej stronie wózka, lewą pelotę analogicznie. Prawidłowo zamontowana pelota została przedstawiona na zdjęciu (fot.170).



**7.24. REF OMO_419 Poduszka siedziska profilowane uda****REF OMO_421 Poduszka siedziska profilowany klin**

Aby zamontować poduszki należy postępować zgodnie z instrukcją montażu poduszki Elastico siedzisko OMO_412 (**patrz 7.15, strona 41**).

Sposób montażu pasów 5-punktowych został opisany w punkcie 6.8.1 (**patrz 6.8.4, strona 27**).



fot.171



fot.172



UWAGA! Każdorazowo przed użyciem pasów 5-punktowych należy sprawdzić czy:

- klamry nie ulegają rozpięciu pod siłą nacisku,
- klamry i paski nie przesuwają się w wyniku niewłaściwego zamontowania.

7.25. REF OMO_129 Pasy odwodząco-stabilizujące uda


Aby zamontować pasy należy:

KROK 1. Wypiąć paski i wysunąć klamry po obu stronach pasa




fot.173




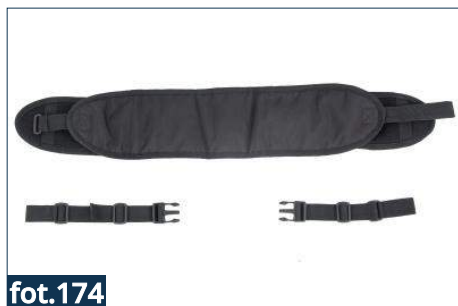

KROK 2. Przepleść pasek przez czarne mocowanie znajdujące się obok oparcia

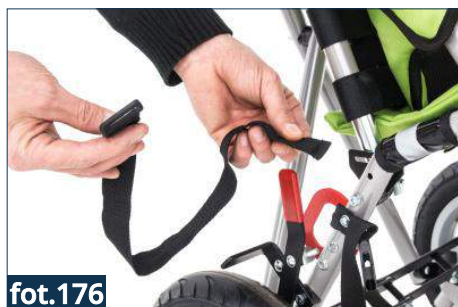

KROK 3. Koniec paska wkładamy w regulator

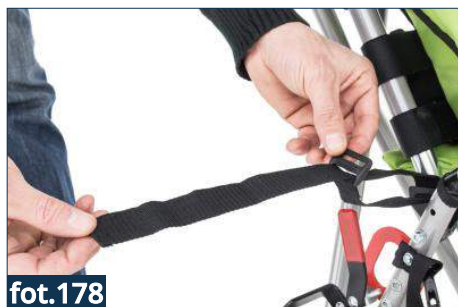

KROK 4. Następnie nakładamy na pasek regulator który zdjęliśmy w KROKU 1



KROK 5. Koniec paska wsuwamy w klamrę



KROK 6. Pas należy położyć na wózku (zwracając szczególną uwagę na układ szwów) i zapiąć go pod siedziskiem



FUNKCJA PRZYWODZĄCA



FUNKCJA ODWODZĄCA



7.26. [REF] OMO_013 Bariierka

Zestaw narzędzi potrzebnych do montażu bariierki:

klucz płaski 10

klucz imbusowy 4

składana bariierka

mocowania bariierki

podkładki siodełkowe

śruby imbusowe z łbem soczewkowym M6x40



podkładki 6.4

nakrętki M6

KROK 1: Odkręć pas spinający wózek znajdujący się na ramie wózka.


KROK 2: Do otworów znajdujących się w ramie wózka wprowadź śruby, a następnie podkładki siodełkowe. Na śrubach osadź element mocujący bariierki, a na jednej ze śrub umieść zdemontowany uprzednio pasek.


fot.191

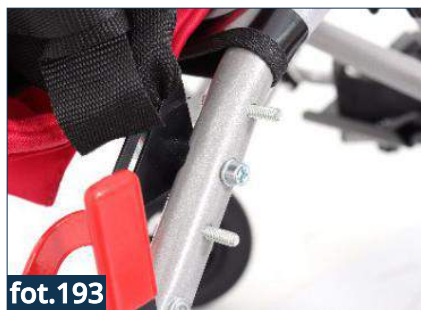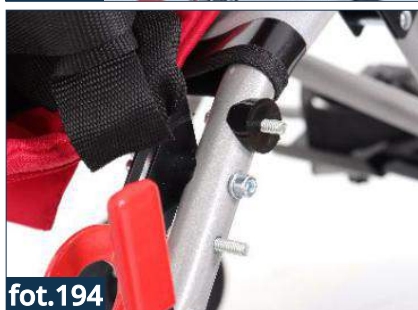
fot.192

fot.193

fot.194

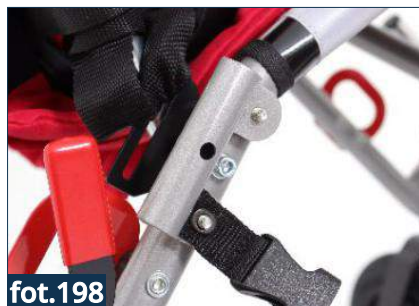fot.195

fot.196

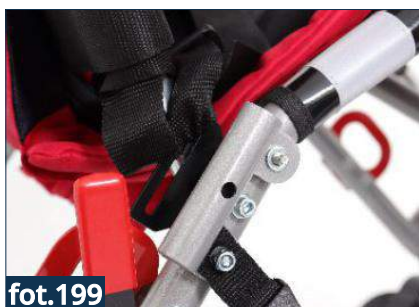
fot.197

fot.198

KROK 3: Załóż podkładki oraz nakrętki. Dokręć mocno śruby przy użyciu klucza płaskiego 10 oraz klucza imbusowego 4.


fot.199


fot.200

fot.201


KROK 4: Czynności te powtórz po drugiej stronie wózka, pomijając montaż paska spinającego wózek.




fot.202

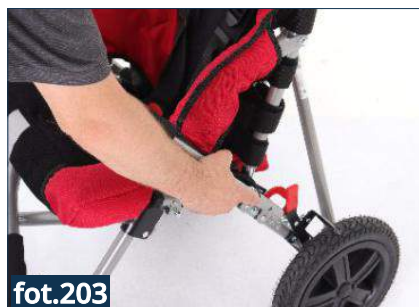

fot.203

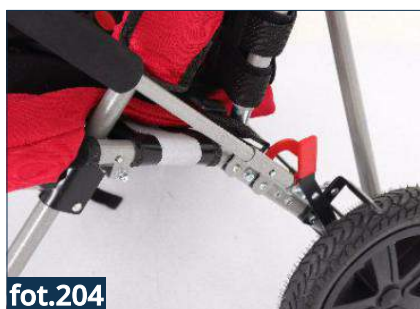

fot.204

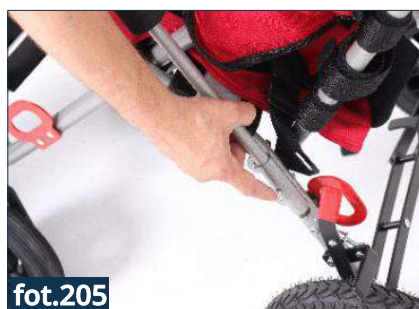

fot.205



fot.206



fot.207

8. UŻYTKOWANIE WÓZKA



Wózek **OMBRELO™** należy użytkować zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji, tylko w obecności osoby przeszkolonej w zakresie jego obsługi. Przed każdym użyciem należy przygotować użytkownika i urządzenie!

8.1 PRZYGOTOWANIE UŻYTKOWNIKA

Przed rozpoczęciem użytkowania wyrobu należy zadbać o to, aby:

- strój użytkownika był lekki, nie krępujący ruchów,
- obuwie było wygodne, dobrze stabilizujące stawy skokowe,
- użytkownik nie był umieszczany w urządzeniu bez odzieży osłaniającej ciało w miejscach kontaktu z tapicerką ze względów higienicznych i w celu przeciwdziałania otarciom ciała,
- w przypadku stosowania wszelkich dodatkowych pomocy typu wenflony, dreny, worki, cewniki itp., były one odpowiednio zabezpieczone przed wypadnięciem, wyrwaniem, zaciśnięciem, w taki sposób, aby nie przeszkadzały podczas użytkowania wyrobu,
- założyć wyroby ortopedyczne (kołnierz szyjny, gorset, ortezy, obuwie ortopedyczne itp.), w przypadku wskazań do ich stosowania.



Ubiór musi chronić skórę użytkownika przed bezpośrednim kontaktem z tapicerką i innymi elementami urządzenia.

Decyzję o stosowaniu określonych wyrobów ortopedycznych podejmuje lekarz prowadzący lub fizjoterapeuta!



8.2 PRZYGOTOWANIE WÓZKA

1. Aby przystąpić do prawidłowego użytkowania należy:

- rozłożyć wózek;
- ustawić na równej powierzchni bez pochyłości, umożliwiając łatwy dostęp do wózka, z dala od źródeł ognia i wysokiej temperatury;
- upewnić się, że wszystkie części wózka są sprawne, należycie zamocowane i stabilne;
- aktywować hamulce;
- dopasować urządzenie do wymiarów użytkownika;
- odpiąć 5-punktowe pasy bezpieczeństwa, aby swobodnie umieścić użytkownika w wózku;
- zapiąć elementy służące do stabilizacji użytkownika (jeżeli występują);
- ustawić klin międzyudowy;
- zamontować stolik (jeżeli występuje).

2. W przypadku użytkowników z nietrzymaniem moczu (z inkontynencją), należy zastosować podkłady higieniczne. Można je nabyć w aptekach lub sklepach medycznych.



Podczas pokonywania przeszkód (progi, krawężniki itp.) należy unieść przednie koła poprzez naciśnięcie rączki do dołu, umieścić je na stopniu, a następnie umieścić na nim koła tylne poprzez podniesienie tylnej części wózka za rączkę w górę. Należy uważać, aby nie przechylić wózka zbyt mocno do tyłu! Podczas pokonywania wzniesień lub podjazdów zawsze należy ustawić wózek przodem do kierunku jazdy.

Przed przystąpieniem do użytkowania wózka należy upewnić się, że wszystkie pasy i zabezpieczenia zostały prawidłowo wyregulowane i zapięte, a mocowania regulowanych elementów mocno dokręcone!

Wózek będzie prawidłowo spełniał swoją funkcję jedynie wtedy, jeżeli będzie dostosowany do wymiarów i potrzeb użytkownika. Główną zasadą przy dopasowywaniu wózka jest zapewnienie użytkownikowi maksymalnego poczucia bezpieczeństwa. Nie należy wymuszać zmiany pozycji ciała użytkownika, gdyż może to powodować jego dyskomfort.

Nieumiejętne korzystanie z wózka może prowadzić do utrwalania nieprawidłowych wzorców postawy.





8.3 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KAMIZELEK



Kamizelka zapewnia wsparcie postawy u osób siedzących na wózkach inwalidzkich, fotelikach lub innych siedziskach rehabilitacyjnych. Przy prawidłowym użyciu, kamizelka piersiowa pozwala utrzymać prawidłową pozycję siedzącą przez dłuższy okres czasu. Dzięki swojej konstrukcji kamizelka nie ogranicza możliwości swobodnych ruchów kończyn górnych.

Jeżeli kamizelka nie jest używana prawidłowo, może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia użytkownika!

Możliwe zagrożenia związane z użytkowaniem kamizelki:

- 1) Jeżeli dolne paski kamizelki zapięte są zbyt luźno, istnieje ryzyko, że kamizelka podniesie się do szyi użytkownika, utrudniając mu oddychanie** – należy zawsze sprawdzać napięcie pasów i ustawić je w taki sposób, aby dolny brzeg kamizelki usytuowany był w okolicach podbrzusza użytkownika.
- 2) Użytkownik zsuwa się z siedziska, górny brzeg kamizelki obejmuje jego szyję i blokuje jego tchawicę utrudniając oddychanie** – z kamizelką ZAWSZE należy stosować wyposażenie stabilizujące miednicę takie jak pas biodrowy, aby zapobiec zsuwaniu się z wózka.
- 3) Istnieje ryzyko, że górne paski mocujące kamizelkę będą uciskać szyję użytkownika utrudniając oddychanie w przypadku, gdy użytkownik został w niewłaściwy sposób zabezpieczony w wózku** – należy wówczas dodatkowo ustabilizować tułów użytkownika przy użyciu pelot bocznych. Jeżeli urządzenie nie posiada takich pelot i nie można poprawnie ustabilizować tułowia, należy wymienić je na urządzenie posiadające taką funkcję.
- 4) Kamizelka jest zbyt mocno dociągnięta do oparcia, w wyniku czego użytkownik nie może swobodnie oddychać** – w takim przypadku należy poluzować pasy mocujące kamizelkę, aby pomiędzy kamizelką, a ciałem użytkownika opiekun mógł swobodnie wsunąć dłoń. Jeżeli jednak zależy nam na poprawnym ustabilizowaniu użytkownika, powinniśmy użyć dynamicznej kamizelki ortopedycznej np. kamizelki **Flex-Point®**, która nie utrudnia użytkownikowi oddychania.





Instrukcja prawidłowego użytkowania kamizelki:

- 1) Upewnij się, że użytkownik siedzi w najlepszej możliwej pozycji:
 - na środku siedziska,
 - głęboko w siedzisku w taki sposób, aby odcinek krzyżowy kręgosłupa przylegał do oparcia.
- 2) Zabezpiecz miednicę użytkownika za pomocą np. pasa biodrowego.
- 3) Upewnij się, że peloty boczne urządzenia, jeżeli są używane, znajdują się we właściwych miejscach. Obowiązkowo korzystanie z pelot bocznych zalecane jest dla użytkowników ze słabą kontrolą tułowia. Peloty te ograniczają ruchy opadania tułowia na bok, które mogą prowadzić do ucisku pasków kamizelki na szyję.
- 4) Zamontuj i dopasuj kamizelkę:
 - zapnij i wyreguluj dolne paski kamizelki, tak aby dolny brzeg kamizelki usytuowany był okolicach podbrzusza użytkownika. Dolne paski kamizelki nie mogą pozostać zbyt luźne!
 - zapnij poziomy pasek kamizelki (jeżeli występuje),
 - zapnij pasy naramienne kamizelki,
 - sprawdź, czy klamry kamizelki nie ulegają rozpięciu pod siłą nacisku,
- 5) Sprawdź pozycję użytkownika:
 - upewnij się, że kamizelka nie może samoistnie przesunąć się do szyi użytkownika,
 - upewnij się, że możesz wsunąć dłoń między ciało użytkownika, a kamizelkę.

Aby zapobiec urazom i maksymalnie zmniejszyć ryzyko związane z użytkowaniem kamizelki należy stosować się do poniższych zasad:

- 1) Pozycja kamizelki **MUSI** bezwzględnie zostać każdorazowo sprawdzona po posadzeniu użytkownika na siedzisku.
- 2) Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie użytkownika przed upadkiem do przodu, ześlizgnięciem się z siedziska lub podniesieniem miednicy. Kamizelka **MUSI** być używana przez cały czas z zabezpieczeniem miednicy użytkownika (np. za pomocą pasa biodrowego). Użycie kamizelki nie może być rozpatrywane osobno lecz jako część ogólnego systemu wsparcia postawy wraz z podporami, takimi jak pasy biodrowe, podparcie pod stopy, stabilizacja tułowia, pasy odwodzące uda, pozycja kubekowa i odchylane oparcie.
- 3) Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby całe stopy użytkownika miały stabilne podparcie. Jeżeli urządzenie nie jest wyposażone w podparcie dla stóp, stopy użytkownika muszą pewnie opierać się o podłoże.





- 4) Należy pamiętać o tym, że każda zmiana kąta pochylenia oparcia, siedziska, podparcia nóg, regulacja funkcji kubełkowej może mieć wpływ na skuteczność pasów i podpór!
- 5) Należy zwrócić szczególną uwagę na wykorzystanie elementów stabilizacji tułowia lub pelot bocznych. Jeśli użytkownik ma słabą kontrolę tułowia, peloty ograniczą ruchy boczne, które mogłyby prowadzić do ucisku paszków kamizelki na szyję użytkownika.
- 6) Montażu i dopasowania kamizelki do użytkownika może dokonać jedynie osoba odpowiednio przeszkolona, zaznajomiona z instrukcją użytkowania kamizelki i zasadami bezpiecznego jej stosowania.
- 7) Nie należy samodzielnie dokonywać żadnych napraw ani przeróbek w kamizelce! W celu naprawy lub wymiany części kamizelki należy skontaktować się z jej producentem!
- 8) Nie należy użytkować uszkodzonej, zniszczonej bądź niekompletnej kamizelki, gdyż stanowi to zagrożenie dla życia i zdrowia użytkownika!
- 9) Nie należy zostawiać użytkownika w urządzeniu bez opieki!
- 10) Należy szczególnie kontrolować prawidłowość stosowania kamizelki zgodnie z zaleceniami u dzieci, osób z zaburzeniami pamięci lub chorych psychicznie.
- 11) Należy upewnić się, że wszystkie osoby, które sprawują opiekę nad użytkownikiem są zaznajomione z zasadami jej bezpiecznego stosowania.

Dbanie o kamizelkę

Kamizelka działa skutecznie tylko wtedy, gdy utrzymana w czystości oraz konserwowana zgodnie z zaleceniami producenta. Przed każdym zastosowaniem kamizelki należy sprawdzić, czy:

- 1) Paski kamizelki nie są postrzępione lub zużyte. Jeśli tak, należy zlecić ich wymianę na nowe.
- 2) Paski kamizelki nie są zaczepione o koła urządzenia.
- 3) Klamry nie są uszkodzone. Jeśli są uszkodzone, należy zlecić ich wymianę na nowe.
- 4) Zapięcie na rzep mocno się trzyma. Jeśli nie, należy usunąć z rzepa wszelkie zanieczyszczenia lub zlecić jego wymianę na nowy.
- 5) Nie nastąpiły żadne zmiany od momentu dopasowania kamizelki do użytkownika, ze względu na jego wzrost, przyrost/utratę wagi.
- 6) Szelki kamizelki należy tak wyregulować, aby nie były zbyt luźne lub zbyt ciasne.
- 7) Należy regularnie czyścić kamizelkę ciepłą wodą z mydłem i osuszać z dala od bezpośredniego światła słonecznego i innych źródeł ciepła. Przed ponownym użyciem kamizelka zawsze musi być sucha.

Jeśli masz jakieś wątpliwości w związku z użytkowaniem kamizelki, skontaktuj się z lekarzem prowadzącym lub fizjoterapeutą.





9. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA



Wózek **OMBRELO™** należy użytkować zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji. Przez każdym użyciem należy przygotować podopiecznego i urządzenie.

Przed decyzją o zakupie wózka **OMBRELO™** należy zasięgnąć porady lekarza specjalisty lub fizjoterapeuty o prawidłowym doborze wózka.

Przed rozpoczęciem użytkowania wózka należy zapoznać się z wszystkimi wskazówkami w załączonej instrukcji.

1. Przed każdorazowym użyciem wózka należy:

- sprawdzić wózek pod kątem widocznych uszkodzeń lub innych wad, mogących zagrażać użytkownikowi podczas eksploatacji wózka;
- upewnić się, czy wszystkie części są poprawnie zamontowane, a wózek nie wykazuje śladów pęknięć i deformacji;
- sprawdzić, czy nie zostały poluzowane śruby, nakrętki i inne połączenia gwintowane, klejone, szyte itp.;
- sprawdzić stan tapicerki, czy nie posiada śladów uszkodzenia;
- sprawdzić sprawność hamulców;
- sprawdzić prawidłowość działania sprzączek;
- zawsze używać pasów bezpieczeństwa, rzepy w tych pasach muszą nachodzić na siebie min. 8 cm;
- dopasować wózek do wymiarów i potrzeb użytkownika poprzez odpowiednie ustawienie oparcia, siedziska, zagłówka, 5-punktowych pasów bezpieczeństwa, klina (jeśli dotyczy);
- upewnić się, czy ruchome części oraz pokrętła regulacji ustawień wózka są stabilne i zablokowane;
- zabezpieczyć użytkownika dostępnymi stabilizującymi elementami wyposażenia wózka. Ma to na celu zabezpieczenie użytkownika m.in. przed wypadnięciem, wysunięciem się z urządzenia;
- w przypadku występowania u użytkownika nadmiernego napięcia w obrębie przywodzicieli kończyn dolnych zalecane jest stosowanie wybranych pasów odwodzących uda w celu zapobiegania powstawaniu odcisnięć i/lub odleżyn w okolicy stawów kolanowych od strony przyśrodkowej.

2. Zabrania się użytkowania wózka w sposób, do którego nie jest on przeznaczony.





3. Zabrania się użytkowania wózka, jeśli jest on uszkodzony lub brakuje jakiegokolwiek jego części.
4. Zabrania się pozostawiania użytkownika w wózku bez opieki i nadzoru osoby dorosłej.
5. Nie należy używać wyrobu, jeżeli nie ma w pobliżu opiekuna, który zapoznał się z instrukcją obsługi.
6. Zabrania się pozostawiania wózka z użytkownikiem bez opieki na terenie pochyłym lub nierównym.
7. Zabrania się wjeżdżania/zjeżdżania wózkiem po schodach, zarówno z użytkownikiem jak i bez.
8. Wsiadanie i wysiadanie użytkownika z wózka zawsze powinno odbywać się przy aktywnym hamulcu.
9. Należy zwrócić uwagę, aby w trakcie wsiadania i wysiadania z wózka użytkownik nie stawał na podnóżku.
10. Należy zwrócić uwagę, aby w trakcie użytkowania wózka kończyny użytkownika nie dostały się między regulowane elementy urządzenia.
11. Wózek należy przechowywać i użytkować z dala od źródeł ognia czy wysokiej temperatury. Wózek nie powinien być również przechowywany i użytkowany w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza.
12. Podczas transportu wózka bez użytkownika należy go dobrze zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia wózka podczas transportu.
13. Przed użyciem wózka należy usunąć wszystkie opakowania papierowe i foliowe. Opakowanie nie jest zabawką! Trzymać z dala od dzieci i zwierząt.





Zabrania się przewożenia użytkownika w wózku w środkach transportu (np. samochodzie, autobusie, pociągu).

Produkt zawiera małe części, które mogą stwarzać niebezpieczeństwo połknięcia przez użytkownika.

Nie należy używać wyrobu, który posiada jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia, zniszczenia, zużycia. Tylko w pełni sprawny wyrób, użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi jest bezpieczny dla użytkownika. W przypadku uszkodzenia wyrobu należy zaniechać jego stosowania i skontaktować się z wytwórcą.

Nie należy podejmować próby samodzielnej naprawy wyrobu oraz dokonywać jakichkolwiek zmian w jego konstrukcji, ponieważ naraża to użytkownika na niebezpieczeństwo i powoduje utratę gwarancji wyrobu.

Należy pamiętać o tym, że wszelkie obciążenia zawieszane na rączce wózka mogą zaburzyć jego stabilność!

Nie należy przekraczać maksymalnej dopuszczanej wagi użytkownika podanej na tabliczce znamionowej oraz w tabeli rozmiarowej na stronie 10 instrukcji.

10. WARUNKI GWARANCJI

- **Akces-MED Sp. z o.o.** sprzedaje wyroby sprawne technicznie, wolne od wad konstrukcyjnych, montażowych, materiałowych itp.
- Wózek **OMBRELO™** jest objęty **24-miesięczną** gwarancją licząc od dnia zakupu sprzętu przez użytkownika. W tym okresie producent gwarantuje naprawy w ramach bezpłatnego serwisu, zgodnie z kartą gwarancyjną.
- Uszkodzenia powstałe po okresie **24 miesięcy** mogą zostać usunięte na koszt użytkownika, chyba że wózek jest przedmiotem refundacji. W takim wypadku użytkownik może wystąpić do NFZ o refundację na naprawę wózka w ramach serwisu pogwarancyjnego.
- Producent określa czas użytkowania wózka na **48 miesięcy**. Po tym okresie użytkownik może użytkować sprzęt tylko pod warunkiem odesłania go do producenta w celu dokonania przeglądu. Po dokonaniu przeglądu producent ponownie określi czas użytkowania wózka oraz datę kolejnego przeglądu.
- W razie uszkodzenia wózka należy skontaktować się z dealerem, u którego zakupiono produkt lub z Działem Obsługi Klienta firmy **Akces-MED Sp. z o.o.** (tel. +48 17 864 04 73).





11. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Wózek **OMBRELO™** będący wyrobem medycznym, powinien być utrzymany w należytej czystości i użytkowany zgodnie z zaleceniami Producenta. Urządzenie należy przechowywać w czystym, suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Konserwacja i czyszczenie muszą być przeprowadzane co najmniej raz w miesiącu. Cykliczne czyszczenie i konserwacja wózka są niezbędne do utrzymania jego prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa.

Zalecenia przy czyszczeniu tapicerki i elementów wózka:

1. Myć letnią wodą przy użyciu miękkiej ściereczki nasączonej łagodnym, ogólnie dostępnym środkiem czyszczącym,
2. Użycie zbyt mokrej ściereczki może spowodować powiększenie plam, zniszczenie tapicerki lub pianki w jej wnętrzu.
3. Po wyczyszczeniu plam, tapicerkę należy przetrzeć czystą wilgotną ściereczką, a następnie osuszyć.
4. Nie należy dopuszczać do przemoczenia tapicerki w trakcie czyszczenia.
5. Tapicerki nie należy zamaczać!
6. Należy pamiętać o usunięciu nadmiaru wilgoci z tapicerki przed kolejnym powtórzeniem czyszczenia
7. Niewskazane jest używanie twardych szczotek.
8. Nie wolno czyścić tapicerki silnymi środkami chemicznymi np. rozpuszczalnikiem czy środkami żrącymi na bazie chloru.
9. Nie wolno czyścić, wymieniać części i konserwować wózka podczas korzystania z niego przez użytkownika.
10. Elementy metalowe i plastikowe należy czyścić ręcznie za pomocą ogólnie dostępnych środków do tworzyw sztucznych, po uprzednim zapoznaniu się z uwagami producenta danego środka czyszczącego.
11. Istnieje możliwość dezynfekcji metalowych, plastikowych, drewnianych oraz tapicerskich elementów wyrobu za pomocą ogólnodostępnego płynu przeznaczonego do dezynfekcji. Aby zdezynfekować wybrany element należy spryskać jego powierzchnie płynem do dezynfekcji ogólnie dostępnym na rynku i wytrzeć suchą, czystą ściereczką. Po dezynfekcji należy odczekać do całkowitego wyschnięcia elementu, szczególnie w przypadku tapicerki. Wybierając alkoholowy środek do dezynfekcji należy w pierwszej kolejności sprawdzić w niewidocznym miejscu, czy preparat nie odbarwi lub nie uszkodzi dezynfekowanej powierzchni.





Przed ponownym użyciem wózka, tapicerka zawsze musi być sucha! **Za szkody powstałe po zastosowaniu nieodpowiednich środków czyszczących wytwórca Akces-MED Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności!**

Przed rozpoczęciem użytkowania należy:

- wyczyścić kółka z wszelkich zanieczyszczeń;
- sprawdzić unosząc podstawę, czy koła są prawidłowo zamocowane, nie zniszczone, czy hamulec blokuje obracające się koło;
- sprawdzić, czy konstrukcja wózka nie wykazuje śladów pęknięć lub innych deformacji;
- sprawdzić, czy wszystkie części ruchome poruszają się w pełnym zakresie, a wszystkie śruby, nakrętki, pokręta itp. są kompletne i dobrze dokręcone;
- sprawdzić, czy paski kamizelki, pasów, pasy stabilizacji stóp itp. nie są postrzępione, a sprzączki i klamry działają prawidłowo.



Wytwórca odpowiada tylko za wady ukryte lub uszkodzenia techniczne powstałe podczas prawidłowego korzystania z wyrobu. Tylko w przypadku ścisłego stosowania się do tych zaleceń, odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie wózka spoczywa na producencie.

W razie wystąpienia jakiegokolwiek uszkodzenia, należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą, u którego zakupiono produkt lub Działem Obsługi Klienta firmy **Akces-MED Sp. z o.o. (tel. +48 17 864 04 73)**.





PRZEGLĄD TECHNICZNY

Przeglądy techniczne należy wykonywać regularnie. Przed podjęciem czynności serwisowych należy dokładnie wyczyścić wyrób, aby ujawnić ewentualne ukryte uszkodzenia.

Częstotliwość	Co należy skontrolować?	Czynności	Uwagi
Przed każdym użyciem.	Stan ogólny wyrobu.	Sprawdzić: <ul style="list-style-type: none"> • cały wyrób pod kątem widocznych wszelkich uszkodzeń, pęknięć oraz wad mechanicznych, • czy wyrób jest kompletny, • czy wszystkie śruby, wkręty, pokrętła, nakrętki i inne elementy konstrukcji wyrobu są kompletne i dokręcone. 	W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
	Koła i hamulce.	Sprawdzić: <ul style="list-style-type: none"> • unosząc podstawę, czy koła są prawidłowo zamocowane, niezniszczone, • czy aktywny hamulec blokuje obracające się koło, • czy koła nie są zabrudzone. Oczyszczyć koła z wszelkich zanieczyszczeń. 	W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
	Mocowania elementów konstrukcyjnych.	Skontrolować wszystkie mechanizmy wózka i jego elementy ruchome, szczególnie sprawdzić: <ul style="list-style-type: none"> • poprawność montażu siedziska (jeśli dotyczy), • poprawność montażu kół (jeśli dotyczy), • poprawność montażu i działania elementów zabezpieczających użytkownika (jeśli dotyczy), • czy wszystkie części ruchome są kompletne, czy poruszają się w pełnym zakresie, nie zacinają się, • poprawność działania mechanizmów regulacji (jeśli dotyczy) elementów tj.: zagłówek, oparcie, siedzisko, klin międzysiodłowy, podłokietniki, podnóżki. 	W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
Elementy tapicerskie.		Sprawdzić: <ul style="list-style-type: none"> • elementy tapicerskie pod kątem wszelkich uszkodzeń, naderwań, pęknięć, poluzowania szwów, deformacji, • czy paski stabilizacji użytkownika, kamizelki, pasy zabezpieczające nie są postrzępione, skręcone, a sprzączki i klamry działają prawidłowo, • czy paski stabilizacji użytkownika, kamizelki pasy zabezpieczające są poprawnie zamontowane i nie rozpinają się pod wpływem nacisku/pociągnięcia. 	W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
Raz na tydzień.	Czyszczenie wyrobu.	Przetrzeć konstrukcję oraz tapicerkę wyrobu z zabrudzeń wynikających z codziennego użytkowania (z kurzu, błota lub innych) za pomocą wilgotnej ściereczki z dodatkiem łagodnego, ogólnie dostępnego środka czyszczącego. Usunąć zanieczyszczenia (np. włosy, resztki po-karmu, itp.) z ruchomych elementów wyrobu.	Wyrób należy czyścić każdorazowo, gdy zajdzie taka potrzeba, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu. Nie używać żadnych środków czyszczących na bazie chloru lub spirytusu metylowego. Przed rozpoczęciem korzystania z wyrobu tapiczerka musi być sucha.





Częstotliwość	Co należy skontrolować?	Czynności	Uwagi
Raz w miesiącu.	Osie kół, sztybnokółca (jeśli dotyczy).	Sprawdzić: <ul style="list-style-type: none"> czy koła swobodnie obracają się na osiach oraz czy nie ma luzów na osiach. Konserwacja polega na aplikacji pomiędzy os, a piastę koła niewielkiej ilości środka konserwującego smarującego. Sprawdzić wpinanie i wypinanie koła. 	W razie stwierdzenia zabrudzeń, oczyścić koła z pozostałości pokarmów, kurzu, włosów lub innych. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
	Połączenia konstrukcji wyrobu (spawane, gwintowane, lutowane).	Sprawdzić: <ul style="list-style-type: none"> stan ramy wyrobu w miejscach łączenia (spawy, gwinty, lutowania). 	W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
	Opony, dętki (jeśli dotyczy).	Sprawdzić: <ul style="list-style-type: none"> stan zużycia bieżnika. Sprawdzić pod kątem widocznych uszkodzeń. Sprawdzić poziom ciśnienia w kołach (jeśli dotyczy). 	W razie stwierdzenia zbyt niskiego ciśnienia w kołach należy dopompować je do właściwego poziomu. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
Raz na 6 miesięcy.	Ruchome elementy konstrukcji.	Sprawdzić: <ul style="list-style-type: none"> ruchome elementy konstrukcji pod kątem ewentualnych uszkodzeń oraz konserwować je przy użyciu dedykowanego środka. 	W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
	Oznakowanie wyrobu.	Sprawdzić: <ul style="list-style-type: none"> oznaczenia i etykietę wyrobu pod kątem ich czytelności. 	W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
Po zakończeniu czasu użytkowania wyrobu.	Szczegółowy przegląd wyrobu.	Przegląd wyrobu.	Wytwórca określa czas użytkowania wyrobu, który jest podany w instrukcji obsługi. Po tym okresie użytkownik może używać wyrób tylko pod warunkiem odesłania go do producenta w celu dokonania przeglądu. Po dokonaniu przeglądu producent ponownie określi czas użytkowania wózka oraz datę kolejnego przeglądu. W przypadku pytań należy skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.













Wykaz wszystkich części zamiennych do pobrania na stronie www.akces-med.com, przy wybranym produkcie.





12. OZNAKOWANIE

12.1 SYMBOLE

-  Poświadczanie oceny zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi przepisów UE
-  Numer katalogowy
-  Numer seryjny
-  Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi
-  Uwaga!
-  Wytwórca
-  Data produkcji
-  Wyrób nie zawiera lateksu
-  Przechowywać w suchym miejscu
-  Zakaz użytkowania wyrobu bez zapiętych pasów zabezpieczających
-  Chronić przed promieniami słonecznymi
-  Ograniczenie temperatury przechowywania
-  Wilgotność względna przechowywania

-  Suszyć pionowo
-  Nie chlorować
-  Nie prasować
-  Nie suszyć w suszarce bębnowej
-  Nie wybielać
-  Nie chlorować
-  Ostrożnie, delikatna zawartość
-  Zakaz zjeżdżania wózkem po schodach, zarówno z użytkownikiem jak i bez
-  Zakaz pozostawiania użytkownika bez opieki w trakcie użytkowania wyrobu
-  Należy zapoznać się z dodatkowymi informacjami.
-  Należy wcisnąć przycisk wskazany na zdjęciu.
-  Do montażu konieczne jest użycie narzędzi wskazanych w opisie.

12.2. PRZYKŁADOWA TABLICZKA ZNAMIONOWA



KOD QR - po zeskanowaniu kieruje do strony internetowej produktu

ADRES WYTWÓRCY

MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE WYROBU

NUMER SERYJNY W FORMIE KODU KRESKOWEGO

NAZWA WYROBU W JĘZYKU POLSKIM

NAZWA WYROBU W JĘZYKU ANGIELSKIM

DATA PRODUKCJI

OZNAKOWANIE patrz wyżej

NUMER SERYJNY




WYTWÓRCA WYROBÓW MEDYCZNYCH



Akces-MED Sp. z o.o.

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Jasionka 955B
36-002 Jasionka
tel. +48 17 864 04 70
e-mail: produkcja@akces-med.com
BDO: 000031619



Autoryzowany Przedstawiciel



akces-med.com

Data wydania: 25.11.2013
Data ostatniej aktualizacji: 30.12.2021
© Sławomir Wroński 2021