



URSUS™

WÓZEK SPECJALNY INWALIDZKI



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Our passion - your independence!

AKCES[®]MED



UWAGA! Producent ponosi odpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie sprzętu wyłącznie w wypadku jego zakupu u wykwalifikowanego pracownika firmy Akces-MED Sp. z o.o. lub w wyspecjalizowanym sklepie medycznym!

UWAGA! Akces-MED Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i handlowych w treści instrukcji bez wcześniejszego uprzedzenia.



Wyrób Medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych. Na wyrób producent wystawił stosowną deklarację zgodności.



Firma Akces-Med Sp. z o.o. wdrożyła system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 13485 w zakresie projektowania całości produkcji, sprzedaży i serwisu. System certyfikowany przez Det Norske Veritas.



SPIS TREŚCI

1. Przeznaczenie instrukcji.....	6
2. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania wyrobu.....	6
3. Ogólna budowa wózka.....	7
3.1. Wyposażenie standardowe.....	7
3.2. Wyposażenie ponadstandardowe.....	8
4. Tabela rozmiarowa	12
5. Opis montażu wózka	13
6. Szczegółowy opis obsługi wózka.....	14
6.1 Składanie wózka.....	14
6.2 Rozkładanie wózka.....	16
6.3 Hamulec, blokada kół przednich.....	16
6.4 Podnózek.....	17
6.5 Siedzisko.....	19
6.6 Peloty biodrowe i piersiowe.....	23
6.7 Stabilizator głowy.....	24
6.8 Oparcie.....	24
6.9 Regulowana rączka.....	25
6.10 Barierka bezpieczeństwa.....	25
6.11 5-punktowe pasy.....	26
6.12 Ciśnienie w oponach.....	27
6.13 Pokrowiec na klucz.....	27
7. Montaż wyposażenia ponadstandardowego.....	28
7.1 USS_501 Torba damska, USS_504 Torba męska, USS_502 Torba DeLux.....	28
7.2 USS_505 Klin międzyudowy.....	28
7.3 USS_126 Pas tułowia.....	28
7.4 USS_134, USS_137 Poduszki zawężające siedzisko 3 cm, 5 cm.....	29
7.5 USS_505 Kosz pod siedzisko.....	30
7.6 USS_402 Parasolka.....	30





7.7	USS_411	Uchwyt na kubek.....	31
7.8	USS_405	Daszek bez osłon bocznych.....	31
7.9	USS_420	Daszek z osłonami bocznymi.....	34
7.10	USS_114	Kamizelka H.....	35
7.11	USS_125	Kamizelka pełna 6-punktowa.....	36
7.12	USS_403	Stolik.....	37
7.13	USS_408	Osłona przeciwdeszczowa.....	38
7.14	USS_130	Kamizelka 4-punktowa.....	38
8.		Użytkowanie wyrobu.....	39
8.1.		Przygotowanie pacjenta.....	39
8.2.		Instrukcja użytkowania wyrobu.....	40
9.		Zasady bezpieczeństwa.....	41
10.		Konserwacja i czyszczenie.....	44
11.		Oznakowanie.....	48





WSTĘP

Lekki wózek **URSUS™** przeznaczony jest do codziennej rehabilitacji dzieci z dysfunkcjami narządu ruchu. Rama oraz siedzisko zostały wykonane z bardzo wytrzymałego aluminium a podwozie jest dodatkowo amortyzowane. **URSUS™** to wózek modułowy co oznacza, że siedzisko możemy przelożyć i użytkować z innymi bazami dostępnymi w naszej ofercie. Dzięki systemowi **ClickClack©** przekładanie siedziska z bazy do bazy jest intuicyjne i bardzo łatwe.

Produkt posiada bardzo wiele regulacji takich jak szerokość i głębokość siedziska, wysokość i kąt pochylenia oparcia oraz podnóżków, płynna regulacja funkcji kubełkowej **TILT-IQ©**, przekładane siedzisko. **URSUS™** został wyposażony w oddychającą tapicerkę przestrzenną, która zapobiega nadmiernemu poceniu się, co istotnie wpływa na komfort użytkowania oraz wspomaga profilaktykę przeciwoleżynową.

Jeśli zajdzie taka potrzeba wózek możemy ustawić do pozycji leżącej tak, aby dziecko mogło w nim spać. Produkt dostępny jest w 3 rozmiarach z bardzo bogatą ofertą akcesoriów, które jeszcze bardziej pozwolą dopasować wózek do indywidualnych potrzeb.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji. Znajdziecie w niej Państwo informacje o naszym produkcie oraz dowiedzie się, jak bezpiecznie i efektywnie z niego korzystać.

Jeśli macie Państwo pytania lub uwagi, prosimy o kontakt z nami:

Konsultant medyczny: tel.kom. +48 516 183 883

Akces-MED Sp. z o.o.: tel. +48 17 864 04 70

e-mail: produkcja@akces-med.com

Dziękujemy za zakup produktu naszej firmy.



UWAGA! Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu, użytkownik jest zobowiązany do zaznajomienia się z niniejszą instrukcją obsługi. Prosimy pamiętać, że stosowanie się do wskazówek zawartych w tej instrukcji pozwoli na bezpieczne korzystanie z wyrobu, przedłuży jego trwałość oraz estetykę.





1 PRZEZNACZENIE INSTRUKCJI

Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje niezbędne do prawidłowego użytkowania wózka **URSUS™**, przygotowania urządzenia do pracy, sposobu konserwacji i czyszczenia. Podręcznik ten należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu. Instrukcja przeznaczona jest dla osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi oraz lekarzy i fizjoterapeutów obsługujących urządzenie.



UWAGA! Przed przystąpieniem do użytkowania wózka **URSUS™** użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszej instrukcji.

Prosimy pamiętać, że stosowanie się do wskazówek zawartych w tej instrukcji pozwoli na bezpieczne korzystanie z wyrobu, przedłuży jego trwałość oraz estetykę.

2 WSKAZANIA I PRZECIWWSKAZANIA DO STOSOWANIA WYROBU

Wyrób medyczny przeznaczony dla osób ze schorzeniami ortopedycznymi, neurologicznymi, kardiologicznymi oraz osób po zabiegach operacyjnych, ze znacznymi dysfunkcjami narządu ruchu, które nie nabyły umiejętności samodzielnego siedzenia lub mają znaczne trudności z przyjęciem i utrzymaniem pozycji siedzącej.

Zarówno dla osób bardzo wiotkich ze zmniejszonym napięciem mięśniowym, jak i dla osób, u których występuje spastyczność. Wyrób może być również bardzo przydatny u osób wymagających długotrwałego odciążenia jednej, lub obu kończyn dolnych. Wyrób stanowi niezastąpioną pomoc w procesie rehabilitacji zarówno w aspekcie ruchowym jak i w integracji społecznej. Doskonale sprawdza się podczas terapii i zabawy, a także innych codziennych aktywności takich jak nauka czy spożywanie posiłków. Dobór odpowiedniego rozmiaru wyrobu zależy od wskazań medycznych i parametrów anatomicznych niezależnie od wieku użytkownika.

Zalecany jest dla osób, u których rozpoznano:

- Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – różne postacie,
- Przepuklinę oponowo-rdzeniową,
- Choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne stawów,
- Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn dolnych, niedowładami czterokończynowymi, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów,
- Zaawansowane choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane – SM, stwardnienie zanikowe boczne – SLA i inne),
- Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami (dystrofie, miastenia, zapalenie wielomięśniowe),
- Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn dolnych,
- Choroby zwyrodnieniowe i metaboliczne układu nerwowego,
- Po urazach, po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokończynowymi (jako etap procesu rehabilitacyjnego lub stałe zaopatrzenie ortopedyczne).

Przeciwwskazania:

- Stan krytyczny pacjenta,
- Paraliż,
- Głęboka sedacja,
- Niestabilne złamania z określonymi zaleceniami ortopedycznymi, w tym złamania kręgosłupa,
- Nieleczona zakrzepica żył głębokich,
- Niestabilność hemodynamiczna,
- Stwierdzone zaburzenia czynności mózgu podczas siedzenia w pozycji wyprostowanej,
- Ciężkie zapalenie stawów kręgosłupa szyjnego,
- Zatorowość płucna,
- Świeży zawał mięśnia sercowego w ciągu ostatnich 24 godzin,
- Świeże rany pooperacyjne lub niegojące się rany w obrębie pleców, okolic obręczy miedniczej, stawów biodrowych oraz ud,
- Użytkownicy z zaburzeniami psychicznymi nie powinni być pozostawieni w wyrobie bez nadzoru opiekuna.





3 OGÓLNA BUDOWA WÓZKA

3.1 Wyposażenie standardowe


1. Ergonomiczny uchwyt do pchania wózka z regulacją wysokości
2. Regulowany stabilizator głowy
3. Osłona mechanizmu składania wózka
4. Rama wózka
5. Niezależne hamulce kół tylnych
6. Koła z tworzywa zbrojonego włóknem szklanym – tylnie pompowane
7. Pasy 5-punktowe
8. Regulowane peloty boczne
9. Miętko wyścielona, wypinana barierka z elementami odbłaskowymi
10. Siedzisko z regulacją głębokości i szerokości, System regulacji kąta pochylenia TILT-IQ® (funkcja kubełkowa),
11. Miękka tapicerka z funkcją odciążania i przewietrzania okolic kręgosłupa ATMO™
12. Podnóżek z regulacją wysokości oraz kąta pochylenia, 5-punktowe paski stabilizujące stopy
13. Koła z tworzywa zbrojonego włóknem szklanym – przednie pełne skrętne z blokadą skrętu
14. Pompka





Pokręta regulacyjne znajdujące się z tyłu wózka:

- A. Pokręta regulacji stabilizatorów głowy
- B. Dźwignia regulacji funkcji kubełkowej
- C. Pokręto regulacji kąta pochylenia oparcia
- D. Pokręta regulacji wysokości oparcia
- E. Element mechanizmu składania wózka

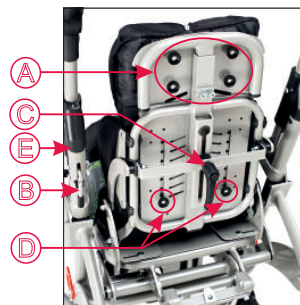

3.2. Wyposażenie ponadstandardowe

 <p>USS_001</p> <p>Światła LED</p>	 <p>USS_002</p> <p>Pas do przenoszenia chorych AM-P</p>	 <p>USS_003</p> <p>Miękka osłona na stolik</p>
 <p>USS_004</p> <p>Niskie osłony boczne głowy</p>	 <p>USS_022</p> <p>Niskie osłony boczne głowy</p>	 <p>USS_101</p> <p>Pasy odwodzące uda</p>
 <p>USS_107</p> <p>Pas biodrowy</p>	 <p>USS_113</p> <p>Pas stabilizujący tułów</p>	 <p>USS_114</p> <p>Kamizelka H</p>
 <p>USS_121</p> <p>Zagłówek z podparciem głowy</p>	 <p>USS_124</p> <p>Pelota lędźwiowa</p>	 <p>USS_125</p> <p>Kamizelka 6-punktowa</p>





USS_126

Pas tułowia




USS_127

Peloty boczne tułowia



USS_128

Klin międzyzudowy

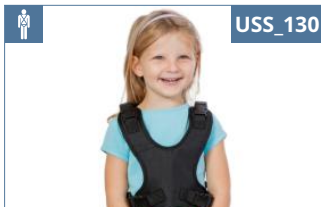

USS_130

Kamizelka 4-punktowa



USS_131

Zagłówek pełny




USS_134

Poduszki zawężające
siedzisko 3 cm (2 szt.)



USS_137

Poduszki zawężające
siedzisko 6 cm (2 szt.)

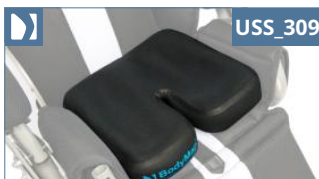

USS_309

Poduszka siedziska
BodyMap A-



USS_310
USS_314

Pokrowiec bawełniany



USS_311
USS_315

Pokrowiec VisMemo



USS_312
USS_316

Dystansowa podkładka



USS_343
USS_344

Pokrowiec elastyczny




USS_343
USS_344

Pokrowiec 3D MESH



USS_313

Poduszka oparcia BodyMap B

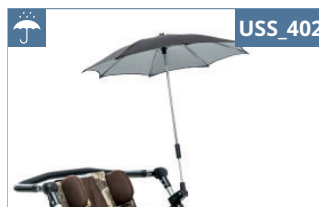

USS_402

Parasolka





 <p>USS_403</p>	 <p>USS_405</p>	 <p>USS_408</p>
Stolik	Daszek	Ośłona przeciwdeszczowa
 <p>USS_409</p>	 <p>USS_409</p>	 <p>USS_411</p>
Moskitiera	Pokrowiec na zagłówek	Uchwyć na kubek
 <p>USS_414</p>	 <p>USS_414</p>	 <p>USS_416</p>
Stolik Plexiglas	Ośłony na koła tylne	USS_416 Śpiwór letni
 <p>USS_417</p>	 <p>USS_418</p>	 <p>USS_420</p>
Śpiwór zimowy	Kapturek do śpiwóru zimowego	Daszek z osłonami bocznymi
 <p>USS_429</p>	 <p>USS_442</p>	 <p>USS_502</p>
Miękka osłona na podnóżek	Ośłony na koła przednie	Torba DeLux





USS_501

Torba damska



USS_504

Torba męska



USS_505

Kosz pod siedzisko



USS_507

Pokrowiec na butlę tlenową




USS_509

Organizer




USS_601

Przystawka Buggy pod IO

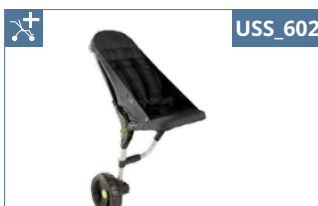


USS_602

Przystawka Buggy pod LITE

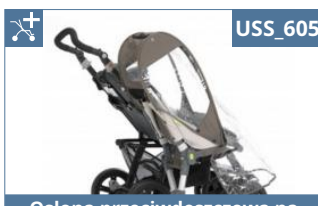


USS_605

Osłona przeciwdeszczowa na przystawki Buggy pod

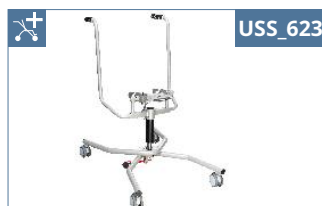

USS_623

Baza pokojowa HOME

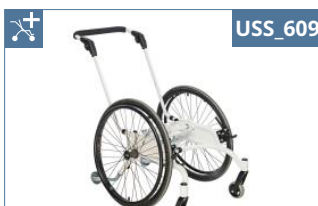

USS_609

Baza aktywna ACTIVE



USS_615

Siedzisko URSUS




USS_623

Baza pneumatyczna QUARK





4 TABELA WYMIAROWA

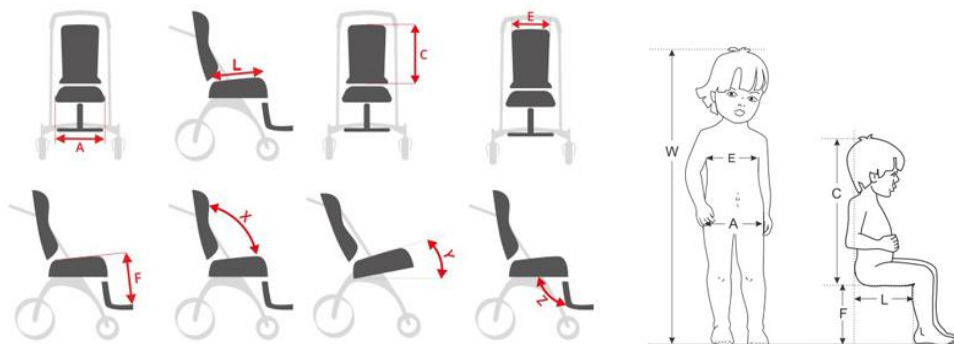

Symbol	Pomiar	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3
W	Orientacyjny wzrost użytkownika*	[cm]	80-100	100-130	130-150
A	Szerokość siedziska	[cm]	19-25	22-30	24-34
B	Głębokość siedziska	[cm]	21-26	27-35	34-42
C	Wysokość oparcia	[cm]	44-55	49-59	55-67
E	Szerokość oparcia	[cm]	23	27	32
F	Długość podnóżków	[cm]	13-29	16-40	16-43
	Długość stopki	[cm]	20	20	20
	Wysokość rączek prowadzących	[cm]	100	100	100
X	Kąt pochylenia oparcia	[°]	90-180	90-180	90-180
Y	Kąt pochylenia siedziska(przodem do kierunku jazdy)	[°]	3-20	3-25	3-30
Y	Kąt pochylenia siedziska(tyłem do kierunku jazdy)	[°]	3-22	3-17	3-20
Z	Kąt pochylenia podnóżków	[°]	90-180	90-180	90-180
	Max. waga użytkownika	[kg]	35	35	50
Wymiary i waga sprzętu			Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3
	Szerokość	[cm]	59	66	67
	Szerokość po złożeniu	[cm]	59	66	67
	Długość	[cm]	90	90	90
	Długość po złożeniu	[cm]	90	90	92
	Wysokość	[cm]	100	100	100
	Wysokość po złożeniu	[cm]	45	48	53
	Waga	[kg]	19,5	21	22,5

UWAGA: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

* Wartość nie powinna być podstawą doboru urządzenia





5 OPIS MONTAŻU WÓZKA


Ze względów transportowych, dostarczany do Państwa wózek jest rozmontowany i składa się z dwóch części: stelaża (16) i siedziska (3). Aby móc użytkować wózek należy:

KROK 1. Aktywować hamulce (12) (**patrz punkt 6.3.1, strona 16**);

KROK 2. Ułożyć siedzisko (3) na stelażu wózka (16) tak, aby **poprzeczka tylna siedziska** (fot.2)(w przypadku ustawienia siedziska tyłem do kierunku jazdy-fot.4) lub **poprzeczka przednia siedziska** (fot.2) (w przypadku ustawienia siedziska przodem do kierunku jazdy - fot.3) znalazła się w **zaczepach** na ramie stelaża (fot.1). Następnie należy mocno docisnąć siedzisko aż przednia lub tylnia poprzeczka montażowa „zaskoczy” na ramie stelaża.



fot.1

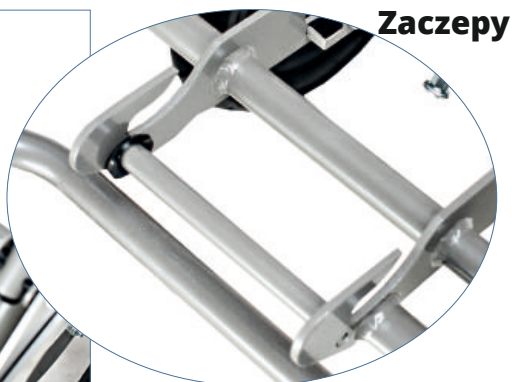

Zaczepty



fot.2


Poprzeczka tylna siedziska

Poprzeczka przednia siedziska





UWAGA! Należy zwrócić uwagę, czy dało się słyszeć charakterystyczny dźwięk kliknięcia, który świadczy o właściwym zamontowaniu siedziska. Należy również sprawdzić, czy siedzisko zostało właściwie zamontowane podnosząc je do góry.

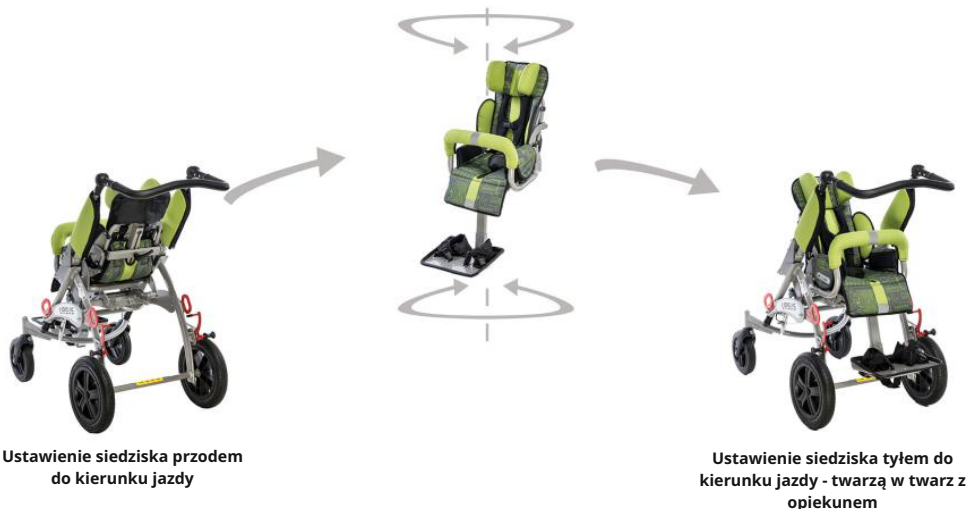

Ustawienie siedziska przodem do kierunku jazdy

Ustawienie siedziska tyłem do kierunku jazdy - twarzą w twarz z opiekunem

6 SZCZEGÓŁOWY OPIS OBSŁUGI WÓZKA

6.1. Składanie wózka

Wózek Ursus można złożyć niezależnie od tego, czy siedzisko wózka jest ustawione przodem czy tyłem do kierunku jazdy. Możliwe jest także złożenie samego stelaża wózka po uprzednim wypięciu siedziska (patrz punkt 6.5). Zalecane jest składanie wózka przy ustawieniu siedziska wózka przodem do kierunku jazdy.

Aby złożyć wózek należy:

KROK 1. Wypiąć barierkę (7) (patrz punkt 6.10, strona 25), aktywować hamulce (12) (patrz punkt 6.3.1, strona 16), złożyć płytę podnóżka (8) (patrz punkt 6.4.2, strona 17);





KROK 2. Położyć oparcie (2) możliwie daleko w przód (regulacja kąta pochylenia oparcia (**patrz punkt 6.8.2, strona 24**);

KROK 3. Stając za wózkiem i pociągnąć do góry elementy mechanizmu składania wózka znajdujące się po obydwu stronach ramy stelaża aż do całkowitego ich wysunięcia (fot. 5);

KROK 4. Jednocześnie należy pchnąć rączkę wózka do przodu aż do całkowitego złożenia się wózka (fot. 6). Prawidłowo złożony wózek został przedstawiony na zdjęciu (fot. 7).

**fot.4****fot.7****fot.6**

UWAGA! Mechanizm składania wózka znajduje się pod osłoną, którą należy ściągnąć lub podsunąć maksymalnie do góry.

UWAGA! W trakcie wykonywania tych czynności na wózku nie może się znajdować człowiek ani przedmiot!





6.2. Rozkładanie wózka do użytkowania

(postępujemy w kolejności odwrotnej do pkt 5.1)

Aby rozłożyć wózek należy mocno pociągnąć rączkę do tyłu, aż do momentu zablokowania się elementów bocznych na ramie i całkowitego rozłożenia się wózka (fot. 8)



fot.8



UWAGA! Należy upewnić się, czy elementy mechanizmu składania wózka nałożyły się na ramę stelaża wózka i są całkowicie zablokowane.

6.3. Hamulce, blokada kół przednich

6.3.1. Aby aktywować hamulec (12) należy wcisnąć dźwignię hamulca (fot.9). Każde koło możemy zablokować niezależnie. Hamulce zostały pomalowane na kolor czerwony.

6.3.2. Wózek standardowo wyposażony jest w przednie koła skrętne z możliwością blokady skrętu (13). W celu aktywacji blokady skrętu kół należy pociągnąć zatrzask i przekręcić, aby trzpień zatrzasku pozostał wysunięty (fot.10).

Zaleca się, aby koła przednie były skierowane ku tyłowi wózka (patrz fot. 8).



fot.9



fot.10





6.4. Podnóżek

6.4.1. **Regulacja kąta pochylenia podnóżka** odbywa się za pomocą dźwigni nastawnej. Aby móc dokonać regulacji należy:

KROK 1. Przekręcić dźwignię w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara (fot. 11);



fot.11

KROK 2. Ustawić żądany kąt pochylenia podnóżka i mocno dokręcić dźwignię, przekręcając zgodnie ze wskazówkami zegara aż do oporu (fot. 12);



fot.12

6.4.2. Aby zmienić kąt pochylenia płyty podnóżka należy:

KROK 1. Za pomocą klucza imbusowego poluzować śruby mocujące blaszkę pod płytą podnóżka (fot. 13);



fot.13





KROK 2. Ustawić żądany kąt pochylenia płyty podnóżka;

KROK 3. Przesunąć blaszkę w dół do oporu (fot. 14) a następnie mocno dokręcić dwie śruby mocujące (fot. 15);

**fot.14****fot.15**

KROK 3. Zapiąć na rzep pasek znajdujący się pod płytą podnóżka (fot. 16).

**fot.16**

6.4.3. Aby móc regulować wysokość podnóżka należy, za pomocą klucza imbusowego, poluzować dwie śruby znajdujące się z tyłu podnóżka (fot.17), ustawić żądaną wysokość a następnie mocno dokręcić śruby (fot.18).

**fot.17****fot.18**




6.4.3. Podnóżek standardowo wyposażony jest w pasy stabilizujące stopy. Pasy zapinane są krzyżowo na klamry a ich długość można regulować (fot. 19,20).

**fot.19****fot.20**

UWAGA! Po dokonaniu regulacji należy mocno dokręcić dźwignię nastawna oraz śruby regulujące wysokość podnóżka. Przed rozpoczęciem użytkowania należy sprawdzić możliwość przesuwu płyty podnóżka.

6.5. Siedzisko

W zależności od potrzeb pacjenta można ustawić siedzisko w dwóch konfiguracjach: zgodnie z kierunkiem jazdy wózka lub odwrotnie, podróżując twarzą w twarz z opiekunem .

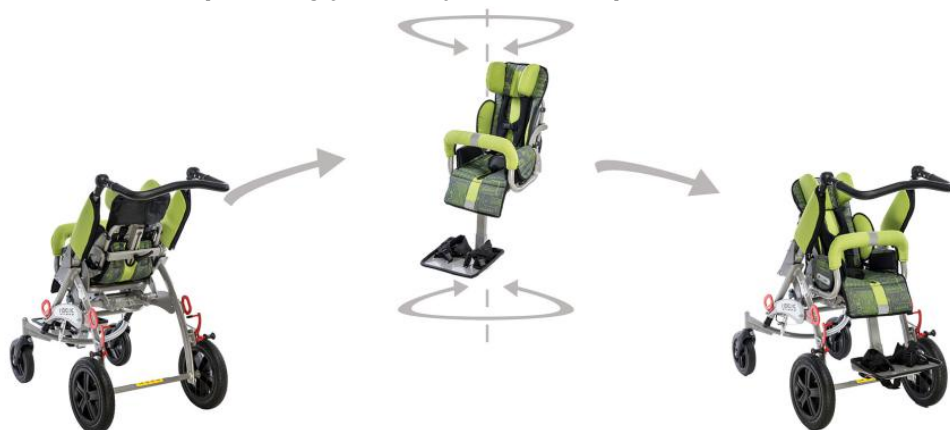

Ustawienie siedziska przodem do kierunku jazdy

Ustawienie siedziska tyłem do kierunku jazdy - twarzą w twarz z opiekunem





6.5.1. Aby przełożyć siedzisko należy:


KROK 1. Aktywować hamulce (**patrz punkt 6.3.1, strona 16**);

KROK 2. Ustawić kąt pochylenia podnóżka tak aby znajdował się równoległe z siedziskiem (**patrz punkt 6.4.1, strona 17**);

KROK 3. Pociągnąć trzpień zatrzasku znajdującego się pod siedziskiem (fot.23), jednocześnie przyciągnąć do siebie uchwyt zwalnający siedzisko (fot. 24) i lekko pchnąć siedzisko do przodu (fot.25). Spowoduje to zwolnienie siedziska z zaczepów.



fot.23

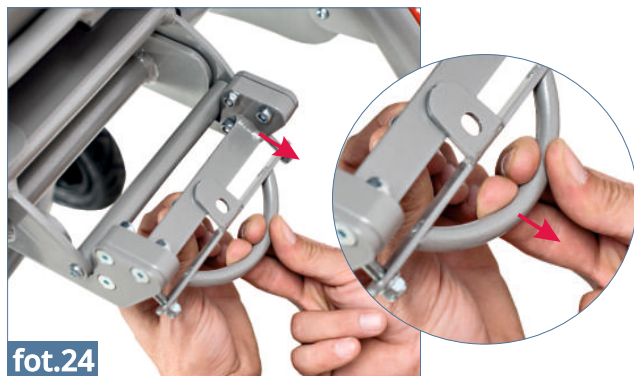

fot.24



fot.25





KROK 4. Podnieść siedzisko i obrócić je (fot.26);

KROK 5. Ułożyć siedzisko na stelażu wózka tak, aby **poprzeczka tylna siedziska** (fot.28) (w przypadku ustawienia siedziska tyłem do kierunku jazdy - fot.19) lub **poprzeczka przednia siedziska** (fot.28)(w przypadku ustawienia siedziska przodem do kierunku jazdy - fot.21) znalazła się w **zaczepach** na ramie stelaża (fot.27). Następnie należy mocno docisnąć siedzisko aż przednia lub tylna poprzeczka montażowa „zaskoczy” na ramie stelaża.

**fot.26****fot.27****fot.28**

Poprzeczka tylna siedziska


Poprzeczka przednia siedziska

Należy zwrócić uwagę, czy dało się słyszeć charakterystyczny dźwięk kliknięcia, który świadczy o właściwym zamontowaniu siedziska. Należy również sprawdzić, czy siedzisko zostało właściwie zamontowane podnosząc je do góry.





6.5.2. Istnieje możliwość regulacji głębokości siedzenia. W tym celu należy poluzować dwie śruby regulacyjne oraz cztery pokrętła regulacyjne znajdujące się pod siedzeniem, ustawić żądaną głębokość, mocno dokręcić śruby oraz pokrętła (fot.29).

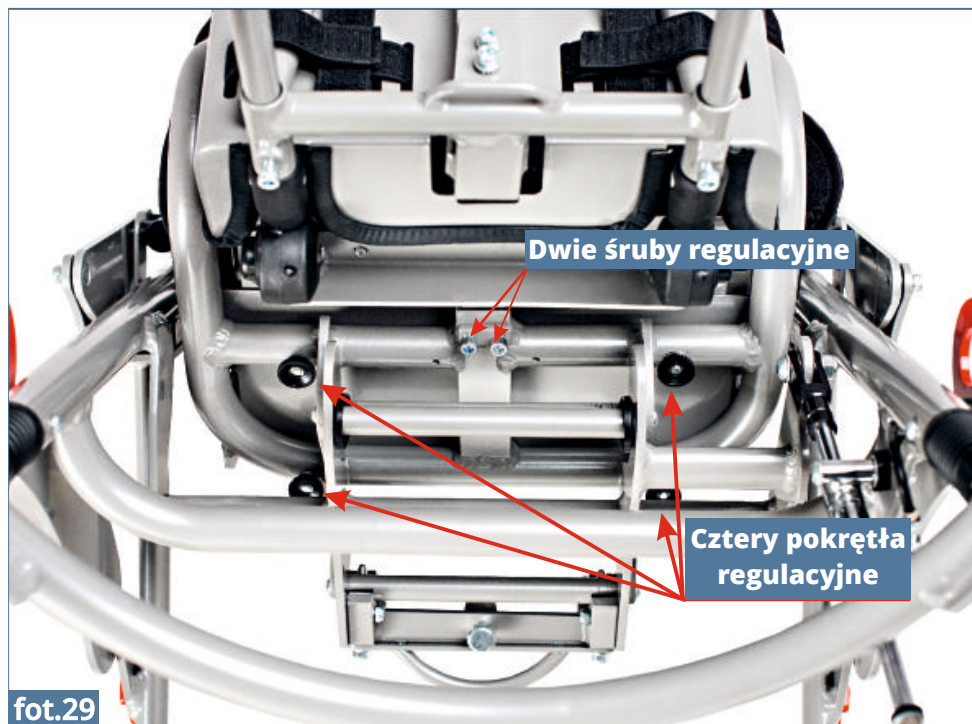

6.5.3. Funkcja kubełkowa siedziska

Aby ustawić siedzisko w pozycji kubełkowej należy pociągnąć w górę dźwignię regulacji funkcji kubełkowej znajdującą się przy ramie wózka i jednocześnie pchnąć siedzisko do przodu ustawiając je w wybranej pozycji (fot.30). Następnie należy zwolnić dźwignię, co spowoduje blokadę siedziska. **Zaleca się, aby w trakcie użytkowania wózka kąt pochylecia siedziska wynosił minimum 3°.**





Maksymalny i minimalny kąt pochylenia siedziska w funkcji kubełkowej

6.6. Peloty biodrowe i piersiowe

6.6.1. Oparcie oraz siedzisko wyposażone są w peloty boczne umożliwiające stabilizację pacjenta. Aby regulować rozstaw pelot biodrowych znajdujących się na siedzisku należy poluzować dwa pokręta znajdujące się pod siedziskiem, ustawić peloty i mocno dokręcić pokręta (fot.33).



6.6.2. W przypadku pelot piersiowych możliwa jest regulacja kąta pochylenia pelot. Peloty piersiowe umieszczone są za pomocą plastikowych uchwytów na ramie stelaża. Jeśli peloty piersiowe nie będą potrzebne można je w łatwy sposób zdemontować poprzez pociągnięcie peloty do siebie (fot.34)





6.7. Stabilizator głowy

6.7.1. Stabilizator głowy posiada możliwość regulacji rozstawu pelot stabilizujących głowę pacjenta. W tym celu należy poluzować pokrętła znajdujące się za stabilizatorem głowy, dostosować rozstaw pelot do potrzeb pacjenta i mocno dokręcić pokrętła (fot.35).



6.8. Oparcie

6.8.1. Aby móc regulować wysokość oparcia należy poluzować 2 śruby w górnej części oparcia oraz 2 pokrętła w dolnej części oparcia (fot.36), ustawić wysokość oparcia, mocno dokręcić śruby i pokrętła.



6.8.2. Istnieje możliwość regulacji kąta pochylenia oparcia. W tym celu należy poluzować pokrętło regulacji kąta pochylenia oparcia znajdujące się za oparciem poprzez przekręcenie go w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara (fot. 37). Następnie należy ustawić oparcie i mocno dokręcić element mocujący w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara.



UWAGA! W skrajnych położeniach rączki może dojść do kolizji z oparciem podczas zmiany jego kąta położenia. W takich przypadkach należy unieść rączkę na czas jego regulacji.



6.9. Regulowana rączka

6.9.1. Aby ustawić rączkę w wybranej pozycji należy wcisnąć równocześnie obydwie przyciski znajdujące się po bokach rączki (fot.38). Zablokowanie rączki w wybranej pozycji następuje po zwolnieniu przycisków.



6.10. Barierka bezpieczeństwa

6.10.1 Barierka bezpieczeństwa chroni pacjenta przed wysunięciem się z wózka w trakcie jego użytkowania. Demontaż bariery możliwy jest po wciśnięciu dwóch przycisków znajdujących się na ramie bariery i pociągnięciu jej do góry (fot. 39).




UWAGA! Po demontażu bariery należy w jej miejsce nałożyć specjalne zaślepki dołączone do wózka. Nie dostosowanie się do powyższego zalecenia może grozić urazem.



6.11 5-punktowe pasy

Wózek wyposażony jest w 5-punktowe pasy stabilizujące pacjenta (fot.40), zabezpieczające go przed wypadnięciem z wózka. Aby zapiąć pasy należy złączyć zapięcia znajdujące się na paskach kamizelki (fot.41) i włożyć je do klamry przy siedzisku (fot.42). Aby odpiąć kamizelkę należy wcisnąć czerwony przycisk klamry i wyjąć zapięcia.

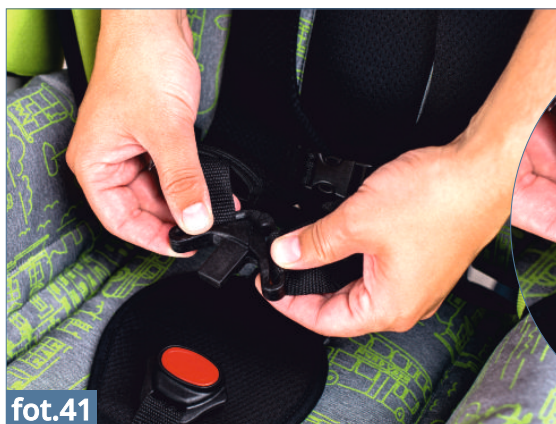**fot.40****fot.41****fot.42**



UWAGA! Po zamontowaniu pasów 5-punktowych należy, pociągając za nie, sprawdzić czy:

- klamry nie ulegają rozpięciu pod siłą nacisku,
- klamry nie przesuwają się w wyniku niewłaściwego zamontowania
- pasy nie wysuwają się z mocowań.

6.12. Ciśnienie w oponach

Należy ściśle przestrzegać zalecanego ciśnienia w oponach, zarówno przednich jak i tylnych.



UWAGA! Zalecane ciśnienie w oponach 1,5 Bar. Należy bezwzględnie przestrzegać zalecanego ciśnienia. Zbyt małe lub zbyt duże ciśnienie w oponach grozi uszkodzeniem wózka, a nawet wypadkiem.

6.13 Pokrowiec na klucz

Standardowo dokładamy uniwersalny klucz imbusowy do regulacji śrub. Kluczyk znajduje się w górnej części oparcia w specjalnej przegródce (fot.43).



fot.43





7 MONTAŻ WYPOSAŻENIA PONADSTANDARDOWEGO

- 7.1 **REF USS_501** Torba damska; **REF USS_504** Torba męska;
REF USS_502 Torba DeLux

Torby są bardzo pojemne i posiadają wiele przydatnych kieszonek. Istnieje możliwość zamocowania ich przy wózku a także noszenia na ramieniu dzięki długiemu, regulowanemu paskowi.



fot.44



fot.45



fot.46

- 7.2 **REF USS_505** Klin międzyudowy

Klin międzyudowy (fot.47) przymocowany jest do siedziska za pomocą pokrętki.



fot.47

- 7.3 **REF USS_126** Pas tułowia

Pas tułowia nie może być stosowany bez zabezpieczenia pacjenta pasami 5-punktowymi lub kamizelką!

Pas tułowia można w łatwy sposób przyciąć na dowolną długość. W tym celu należy:

KROK 1. Rozpiąć pas z tyłu (fot.48).



fot.48





KROK 2. Wybrać odpowiednią długość pasa i przyciąć go w miejscu do tego wyznaczonym (fot.49, 50).



KROK 3. Następnie należy spiąć końce pasa za pomocą specjalnej zapinki na rzepy (fot.51). Pas zapina się na wózku wokół oparcia (fot.52).



7.4 **REF USS_134** Poduszki zawężające siedzisko 3 cm,

REF USS_137 Poduszki zawężające siedzisko 5 cm,

Poduszki zawężające siedzisko 3 cm i 5 cm pomagają dopasować szerokość siedziska do wymiarów pacjenta. Ich montaż na siedzisku możliwy jest dzięki rzepom znajdującym się na tapicerce wózka (fot.53-54).





7.5 **REF USS_505** Kosz pod siedzisko

Kosz pod siedzisko (fot.55) montowany jest na ramie stelaża pod siedziskiem za pomocą pasków z guzikami na zatrzask (fot. 53, 54).

**fot.55****fot.56****fot.57**

7.6 **REF USS_402** Parasolka

Aby zamontować parasolkę (fot.58) należy poluzować zacisk, umieścić go na ramie rączki wózka, następnie ustawić odpowiednią pozycję i dokręcić pokrętkę (fot.59). Ustawienie parasolki można regulować poprzez przycisk znajdujący się przy zacisku (fot.60).

**fot.58****fot.59****fot.60**

7.7 **REF USS_411** Uchwyt na kubek

Aby zamontować uchwyt na kubek (fot.62) należy poluzować zacisk, umieścić go na ramie rączki wózka, następnie ustawić odpowiednią pozycję i dokręcić pokrętkę (fot. 61). Jeżeli stosowane są osłony rączki kubek można przymocować w dowolnym miejscu stelaża wózka.



7.8 **REF USS_405** Daszek bez osłon bocznych

Aby zamontować daszek należy:

KROK 1. Rozsunąć tapicerkę (fot.63) i nałożyć ją na oparcie, tak aby był widoczny tył oparcia wózka;

KROK 2. Odkręcić po dwie śruby mocujące przy ramie oparcia z obydwu stron wózka (fot.64);





KROK 3. W miejsce otworów, do ramy oparcia przykręcić uchwyt daszka za pomocą odkręconych wcześniej śrub w sposób pokazany na zdjęciu (fot.65);



KROK 4. Nałożyć tapicerkę i zapiąć zamek;



KROK 5. Rozsunąć zamek znajdujący się z tyłu daszka;

KROK 6. Włożyć ramy daszka w dwa otwory znajdujące się w tapicerce oparcia (fot.66) a następnie, poprzez lekkie dociśnięcie, wpiąć daszek w uchwyty zamocowane w KROKU 3 na ramie oparcia (fot. 67, 68);


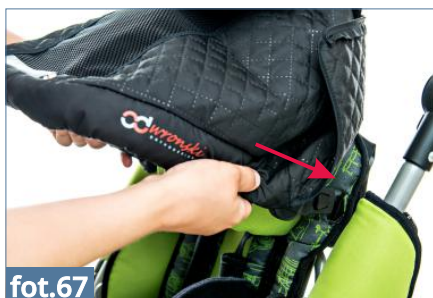
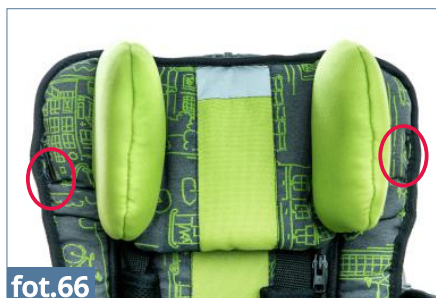






KROK 7. Zapiąć zamek (fot.69), rozłożyć daszek (fot.70-72);

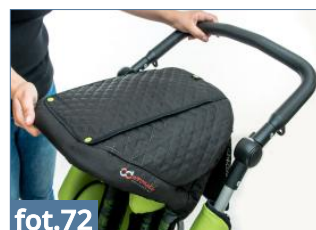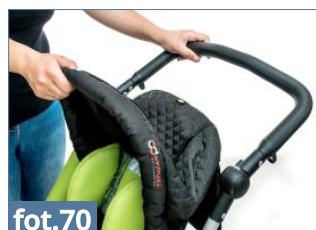

KROK 8. Istnieje możliwość regulacji budki daszka (fot.73-75) poprzez pociągnięcie daszka w dół w stronę siedziska.

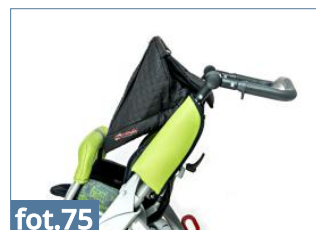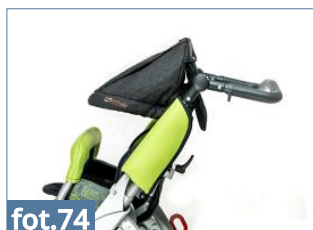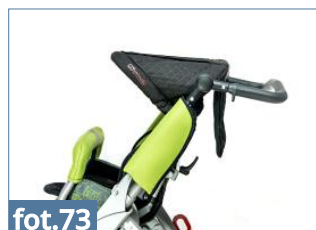

KROK 9. W budce daszka znajduje się okienko, które można odsłonić aby móc obserwować dziecko siedzące w wózku. W tym celu należy zwinąć zewnętrzną osłonę i zamocować ją przy budce daszku na zatrzask (fot.76,77).

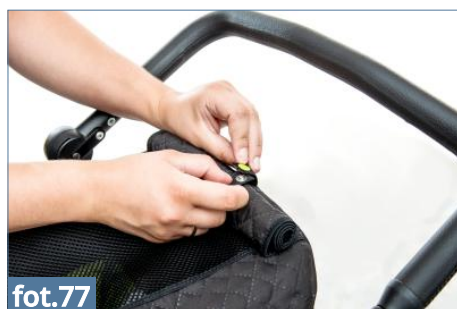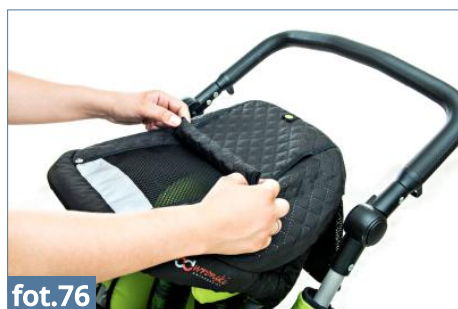



7.9 **REF** USS_420 **Daszek z osłonami bocznymi**

Aby zamontować daszek z osłonami bocznymi należy:

KROK 1. Zamontować na wózku daszek postępując zgodnie z instrukcją montażu daszka bez osłon bocznych (**patrz punkt 7.8, Daszek bez osłon bocznych USS_405, strona 31-33**),

KROK 2. Osłony boczne należy przełożyć pod podnóżkiem tak aby elastyczny pas osłon znajdował się pod siedziskiem wózka (fot. 78);

KROK 3. Boczne osłony przypinane są do budy daszka za pomocą rzepów (fot. 79);

KROK 4. Istnieje możliwość zwinięcia zewnętrznych osłon tak, by pozostawić po bokach przewiewną siatkę. W tym celu należy odpiąć zatrzask znajdujący się na dole osłony (fot.80), zwinąć zewnętrzną osłonę (fot.81) i zamocować ją przy budce daszku za pomocą zatrzasku.

**fot.78****fot.79****fot.80****fot.81**



7.10 **REF** USS_114 Kamizelka H

Aby zamontować kamizelkę H należy:

KROK 1. Wymontować standardowe pasy 5-punktowe.

KROK 2. Górne paski kamizelki H należy wsunąć w rowki znajdujące się w oparciu wózka (fot.82) a następnie włożyć w zapinki znajdujące się z tyłu oparcia (fot.83). Zapinki należy mocno zaciśnąć na paskach (fot.84).

**fot.83**

Dolne paski kamizelki H należy przełożyć za oparcie i włożyć w zapinki (fot.85). Zapinki należy mocno zaciśnąć na paskach.

**fot.82****fot.84****fot.85**



KROK 3. Kamizelka zapinana jest na klamrę, co w razie potrzeby umożliwi szybkie odpięcie pacjenta (fot.86). Dzięki uchwytom przy paskach, kamizelkę można dostosować do wymiarów pacjenta (fot.87).

**fot.86****fot.87**

**7.11 [REF USS_125] Kamizelka pełna 6-punktowa**

Aby zamontować kamizelkę 6-punktową należy:

KROK 1. Włożyć ją na pacjenta a następnie zapiąć zamek błyskawiczny i klamrę z przodu kamizelki (fot.88-91);

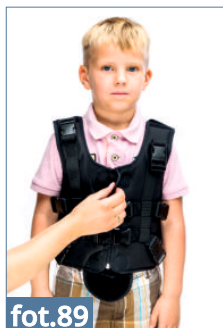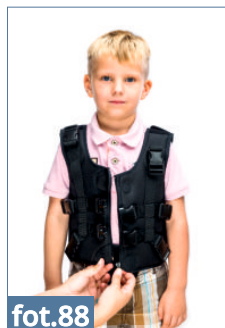

KROK 2. Dopasować kamizelkę poprzez regulację rzepów znajdujących się z tyłu kamizelki (fot.92, 93);

KROK 3. Zamontować kamizelkę na wózku w taki sam sposób jak w przypadku kamizelki H (**patrz punkt 7.10, Kamizelka H, KROK 1-2, strona 35**);



KROK 3. Przypiąć kamizelkę do wózka za pomocą pasa obwodowego, który należy przełożyć za oparcie wózka i zapiąć z przodu kamizelki (fot. 94- 95).





7.12 **REF** USS_403 **Stolik**

Aby zamontować stolik należy:

KROK 1. Wymontować barierkę bezpieczeństwa (patrz punkt 6.10, strona 25).

KROK 2. W miejsce barierki należy zamontować stolik w taki sposób, aby przyciski na rurze stolika „zaskoczyły” w otwory w ramie stelaża (fot. 97).



KROK 3. Możliwa jest regulacja kąta pochylecia blatu stolika. W tym celu należy poluzować dźwignię znajdującą się pod blatem, przekręcając ją w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara (fot. 98, 99). Po ustawieniu kąta pochylecia blatu należy mocno dokręcić dźwignię, przekręcając ją w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara.





7.13 **REF USS_408** Osłona przeciwdeszczowa

Osłona przeciwdeszczowa (fot.100) zakładana jest na wózek, na którym wcześniej zamontowano Daszek bez osłon bocznych (**USS_405**) lub Daszek z osłonami bocznymi (**USS_420**).

Aby zamontować osłonę przeciwdeszczową należy:

KROK 1. Nałożyć osłonę na daszek i cały wózek z uwzględnieniem podnóżka (fot. 100-102). Przy nakładaniu osłony należy zwrócić uwagę na to, aby okienko w osłonie znajdowało się na wprost twarzy pacjenta .

**fot.100****fot.101****fot.102**

7.14 **REF USS_103** Kamizelka 4-punktowa

Aby zamontować kamizelkę 4-punktową należy:

KROK 1. Zamontować kamizelkę na wózku w taki sam sposób jak w przypadku kamizelki H (**patrz punkt 7.10, Kamizelka H, KROK 1-2, strona 35**). Pociągając za uchwyty przy paskach można szybko dopasować kamizelkę do wymiarów pacjenta.

**fot.103**



8 UŻYTKOWANIE WYROBU



UWAGA! Wózek **URSUS™** należy użytkować zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji, tylko w obecności osoby przeszkolonej. Przed każdym użyciem należy przygotować pacjenta i urządzenie!

8.1. Przygotowanie pacjenta

Przed rozpoczęcie użytkowania wyrobu należy zadbać o to aby:

- strój pacjenta był lekki, nie krępujący ruchów, najlepiej sportowy,
- obuwie było wygodne, dobrze stabilizujące staw skokowy,
- pacjenta nie był umieszczany w urządzeniu bez odzieży osłaniającej ciało w miejscach kontaktu z tapicerką ze względów higienicznych i w celu przeciwdziałania otarciom ciała,
- w przypadku stosowania wszelkich dodatkowych pomocy typu wenflony, dreny, worki, cewniki itp. były one zabezpieczone przed wypadnięciem, wyrwaniem, zaciśnięciem w taki sposób, aby nie przeszkadzały podczas użytkowania wyrobu,
- w przypadku wskazań do stosowania zaopatrzenia ortopedycznego (kołnierz szyjny, gorset, ortezy, obuwie ortopedyczne) założyć je.



UWAGA! Ubiór musi chronić skórę pacjenta przed bezpośrednim kontaktem z tapicerką i innymi elementami urządzenia.

UWAGA! Decyzję o stosowaniu określonego zaopatrzenia ortopedycznego podejmuje lekarz prowadzący!





8.2. Instrukcja użytkowania wózka

1. Aby przystąpić do prawidłowej eksploatacji należy:

- Rozłożyć urządzenie;
- Ustawić urządzenie na równej powierzchni bez pochyłości, umożliwiając dobry dostęp do wózka;
- Upewnić się, że wszystkie części są sprawne, należycie zamocowane i stabilne;
- Aktywować hamulce;
- Dopasować urządzenie do wymiarów pacjenta;
- Odpiąć kamizelkę, pasy tułowia itp. tak, aby umożliwić swobodne ułożenie pacjenta w wózku;
- Umieścić pacjenta w wózku;
- Zapiąć elementy służące do stabilizacji pacjenta np. kamizelkę, pasy tułowia, paski stabilizujące stopy itp.;
- Zamontować dodatkowe wyposażenie wózka.

2. W przypadku pacjentów „moczących się” należy położyć na siedzisko specjalną ceratkę, którą można nabyć w aptekach lub sklepach medycznych i rehabilitacyjnych.

3. Podczas użytkowania wózek należy zawsze trzymać go za rączkę, aby nie dopuścić do jego bezwładnego toczenia się.

4. Podczas pokonywania wzniesień lub podjazdów zawsze należy ustawić wózek przodem do kierunku jazdy.

5. Podczas pokonywania przeszkód (progi, krawężniki itp.) należy unieść przednie koła poprzez naciśnięcie rączki do dołu, umieścić je na stopniu a następnie umieścić koła tylne poprzez podniesienie tylnej części wózka za rączkę w górę.

Sprzęt jedynie wtedy będzie prawidłowo spełniał swoją funkcję, jeżeli będzie dostosowany do wzrostu i ciężaru ciała pacjenta, na co trzeba zwrócić uwagę przy zakupie wózka. Główną zasadą przy dopasowywaniu wózka jest zapewnienie pacjentowi maksymalnego poczucia bezpieczeństwa. Nie należy wymuszać pozycji ciała dziecka, gdyż może to powodować dyskomfort i doprowadzić do powstania złej postawy użytkownika.



UWAGA! Przed przystąpieniem do użytkowania wózka należy upewnić się, że wszystkie pasy i zabezpieczenia zostały prawidłowo wyregulowane i zapięte a mocowania regulowanych elementów mocno dokręcone!





9 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA



UWAGA! Wózek **URSUS™** należy użytkować zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji. Przez każdym użyciem należy przygotować pacjenta i urządzenie.

Przed decyzją zakupu wózka **URSUS™** należy zasięgnąć porady lekarza specjalisty lub rehabilitanta o prawidłowym doborze wózka oraz jego rozmiarze. Przed rozpoczęciem użytkowania wózka należy zapoznać się z wszystkimi wskazówkami w załączonej instrukcji.

1. Przed każdorazowym użyciem wózka należy:

- sprawdzić urządzenie pod kątem widocznych uszkodzeń lub innych wad, mogących zagrażać pacjentowi podczas eksploatacji wózka należy upewnić się, czy wszystkie części są sprawne i należycie zamontowane, a urządzenie nie wykazuje śladów pęknięć i deformacji;
- sprawdzić czy nie poluzowały się śruby, nakrętki i inne połączenia gwintowane, klejone, szyte itp.;
- sprawdzić sprawność hamulców;
- sprawdzić prawidłowość działania sprzączek;
- zawsze używać pasów bezpieczeństwa, rzepy w tych pasach muszą nachodzić na siebie min. 8 cm;
- dopasować urządzenie do wymiarów i potrzeb pacjenta np. ustawienie pelot, podnóżka itp.;
- upewnić się, czy ruchome części oraz pokrętła regulacji ustawień urządzenia są stabilne i zablokowane;
- zabezpieczyć pacjenta wszelkimi dostępnymi stabilizującymi elementami wyposażenia wózka takimi jak: kamizelka, pasy stabilizujące stopy, peloty, klin międzyudowy, zagłówek. Ma to na celu zabezpieczenie pacjenta m.in. przed wypadnięciem, wysunięciem się z urządzenia. W przypadku występowania u pacjenta przykurczu przywiedzeniowego zalecane jest stosowanie pasa odwodzącego w celu zapobiegania powstawaniu odleżyn między kolanami (od strony przyśrodkowej).





2. Zabrania się użytkowania wózka w sposób, do którego nie jest on przeznaczony.
3. Zabrania się użytkowania urządzenia jeśli jest on uszkodzony lub brakuje jakiegokolwiek jego części.
4. Zabrania się pozostawiania pacjenta w wózku bez opieki i nadzoru osoby dorosłej.
5. Nie należy używać urządzenia jeżeli nie ma w pobliżu przeszkolonego opiekuna lub personelu medycznego.
6. Zabrania się pozostawiania wózka z pacjentem na terenie pochyłym lub nierównym bez opiekuna, pomimo aktywnego hamulca.
7. Zabrania się wjeżdżania/zjeżdżania wózkiem po schodach, zarówno z pacjentem jak i bez.
8. Wsiadanie i wysiadanie pacjenta z wózka zawsze powinno odbywać się przy aktywnym hamulcu.
9. Należy zwrócić uwagę, aby w trakcie użytkowania wózka kończyny pacjenta nie dostawały się między regulowane elementy wózka.
10. Pomimo iż urządzenie łącznie z tapicerką wykonane jest z materiałów nie podtrzymujących palenia, podczas użytkowania należy unikać zbliżania się do źródeł ognia czy źródeł wysokiej temperatury. Wózek nie powinien być również przechowywany i użytkowany w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza.
11. Podczas transportu wózka bez pacjenta należy go dobrze zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia wyrobu podczas transportu.





UWAGA! Zabrania się przewożenia pacjenta w wózku w środkach transportu (np. samochodzie, autobusie, pociągu).

UWAGA! Produkt zawiera małe części, które mogą być niebezpieczne w przypadku połknięcia przez dziecko.

UWAGA! Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w konstrukcji wózka, ponieważ jest to niebezpieczne dla pacjenta i powoduje utratę gwarancji.

UWAGA! Nie należy przekraczać maksymalnej dopuszczanej wagi użytkownika podanej na tabliczce znamionowej oraz w tabeli pomiarowej na stronie 12 instrukcji.

UWAGA! Nieprawidłowa konfiguracja urządzenia może doprowadzić do ubocznych skutków takich jak omdlenia, deformacje ciała, przeciążenia stawów itp. W razie ich wystąpienia należy natychmiast przerwać rehabilitację, wyjąć użytkownika z urządzenia i położyć. Jeżeli niepożądane objawy się utrzymują należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub fizjoterapeutą. Jeżeli objawy ustąpiły należy o tym fakcie powiadomić lekarza prowadzącego lub fizjoterapeutę w celu podjęcia decyzji odnośnie dalszego przebiegu procesu rehabilitacji.

Poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

- 1) **Akces-MED Sp. z o.o.** sprzedaje sprzęty sprawne technicznie, wolne od wad konstrukcyjnych, montażowych, materiałowych itp.
- 2) Wózek **URSUS™** jest objęty **24 miesięczną** gwarancją licząc od dnia zakupu sprzętu przez pacjenta. W tym okresie producent gwarantuje naprawy w ramach bezpłatnego serwisu, zgodnie z kartą gwarancyjną.
- 3) Uszkodzenia powstałe po okresie **24 miesięcy** mogą być usunięte na koszt użytkownika, chyba że sprzęt jest przedmiotem refundacji. W takim wypadku Użytkownik może wystąpić o refundację przez NFZ naprawy sprzętu wykonanej w ramach serwisu pogwarancyjnego.
- 4) Producent określa czas użytkowania wyrobu na **48 miesięcy**. Po tym okresie Użytkownik może użytkować sprzęt tylko pod warunkiem odesłania go do Producenta w celu dokonania przeglądu. Po dokonaniu przeglądu Producent ponownie określi czas użytkowania wyrobu oraz datę kolejnego przeglądu.
- 5) W razie uszkodzenia sprzętu należy skontaktować się z dealerem, u którego zakupiono produkt lub z Działem Obsługi Klienta firmy **Akces-MED Sp. z o.o.** (tel. +48 17 864 04 70, e-mail: produkcja@akces-med.com).





10 KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Wózek będący urządzeniem medycznym, powinien być utrzymany w należytej czystości i użytkowany zgodnie z zaleceniami producenta. Urządzenie należy przechowywać w czystym, suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Konserwacja i czyszczenie urządzenia muszą być przeprowadzane co najmniej raz w miesiącu. Cykliczne czyszczenie i konserwacja wózka są niezbędne do utrzymania jego prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa.

Aby Państwa wózek zachowywał odpowiednią estetykę należy zapewnić mu właściwą konserwację. W tym celu należy stosować się do poniższych wskazówek:

1. W przypadku zabrudzenia tapicerki zaleca się mycie letnią wodą oraz miękką szmatką nasączoną łagodnym, ogólnie dostępnym środkiem czyszczącym. Użycie zbyt mokrej szmatki może spowodować powiększenie plamy, zniszczenie tapicerki lub pianki w jej wnętrzu. Należy pamiętać o usunięciu nadmiaru wilgoci z tkaniny przed kolejnym powtórzeniem czyszczenia. Po wywabieniu plamy, tapicerkę należy opłukać przy użyciu letniej wody i czystej białej szmatki.
2. Tapicerki nie należy zamaczać!
3. Niewskazane jest używanie twardych szczotek.
4. Nie wolno czyścić tapicerki mocnymi środkami chemicznymi np. rozpuszczalnikiem czy środkami żrącymi, chloru.



UWAGA! Za szkody powstałe po zastosowaniu nieodpowiednich środków czyszczących firma Akces-MED Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.

5. Nie należy dopuszczać do przemoczenia tapicerki w trakcie czyszczenia. Przed ponownym użyciem urządzenia tapicerka zawsze musi być sucha!
6. Nie wolno czyścić, wymieniać części i konserwować wózka podczas używania go przez pacjenta.
7. Elementy metalowe i plastikowe należy czyścić ręcznie za pomocą ogólnie dostępnych środków do tworzyw sztucznych, po uprzednim zapoznaniu się z uwagami producenta danego środka czyszczącego.





UWAGA! Przed ponownym użyciem wózka, tapicerka zawsze musi być sucha!

Przed rozpoczęciem użytkowania należy:

- wyczyścić kółka z wszelkich zanieczyszczeń;
- sprawdzić unosząc podstawę czy koła są prawidłowo dokręcone, nie zniszczone, czy hamulec zatrzymuje obracające się koło;
- upewnić się czy części drewniane np. stolik nie mają drzazg;
- sprawdzić, czy konstrukcja wózka nie wykazuje śladów pęknięć lub innych deformacji;
- sprawdzić, czy wszystkie części ruchome poruszają się w pełnym zakresie, a wszystkie śruby, nakrętki, pokrętła itp. są kompletne i dobrze dokręcone;
- sprawdzić, czy paski kamizelki, pasów tułowia, pasy stabilizacji stóp itp. nie są postrzępione, a sprzączki i klamry działają prawidłowo.



UWAGA! Producent odpowiada tylko za wady ukryte lub uszkodzenia techniczne powstałe przy prawidłowej eksploatacji wyrobu. Tylko w przypadku ścisłego stosowania się do tych zaleceń, odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie wózka spoczywa na producencie.

UWAGA! W razie wystąpienia jakiegokolwiek uszkodzenia, należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą, u którego zakupiono produkt.



Elektroniczną wersję tej instrukcji znajdą Państwo na stronie internetowej:
<https://akces-med.com/product/ursus/>





PRZEGLĄD TECHNICZNY

Przeglądy techniczne należy wykonywać regularnie. Przed podjęciem czynności serwisowych należy dokładnie wyczyścić wyrób, aby ujawnić ewentualne ukryte uszkodzenia.

Częstotliwość	Co należy skontrolować?	Czynności	Uwagi
Przed każdym użyciem.	Stan ogólny wyrobu.	Sprawdzić: <ul style="list-style-type: none"> cały wyrób pod kątem widocznych wszelkich uszkodzeń, pęknięć oraz wad mechanicznych, czy wyrób jest kompletny, czy wszystkie śruby, wkręty, pokręta, nakrętki i inne elementy konstrukcji wyrobu są kompletne i dokręcone. 	W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
	Koła i hamulce.	Sprawdzić: <ul style="list-style-type: none"> unosząc podstawę, czy koła są prawidłowo zamocowane, niezniszczone, czy aktywny hamulec blokuje obracające się koło, czy koła nie są zabrudzone. Oczyszczyć koła z wszelkich zanieczyszczeń. 	W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
	Mocowania elementów konstrukcyjnych.	Skontrolować wszystkie mechanizmy wózka i jego elementy ruchome, szczególnie sprawdzić: <ul style="list-style-type: none"> poprawność montażu siedziska (jeśli dotyczy), poprawność montażu kół (jeśli dotyczy), poprawność montażu i działania elementów zabezpieczających użytkownika (jeśli dotyczy), czy wszystkie części ruchome są kompletne, czy poruszają się w pełnym zakresie, nie zacinają się, poprawność działania mechanizmów regulacji (jeśli dotyczy) elementów tj.: zagłówek, oparcie, siedzisko, klin międzysiodłowy, podłokietniki, podnóżki. 	W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
Elementy tapicerskie.		Sprawdzić: <ul style="list-style-type: none"> elementy tapicerskie pod kątem wszelkich uszkodzeń, naderwań, pęknięć, poluzowania szwów, deformacji, czy paski stabilizacji użytkownika, kamizelki, pasy zabezpieczające nie są postrzępione, skręcone, a sprzączki i klamry działają prawidłowo, czy paski stabilizacji użytkownika, kamizelki pasy zabezpieczające są poprawnie zamontowane i nie rozpinają się pod wpływem nacisku/pociągnięcia. 	W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
Raz na tydzień.	Czyszczenie wyrobu.	Przetrzeć konstrukcję oraz tapicerkę wyrobu z zabrudzeń wynikających z codziennego użytkowania (z kurzu, błota lub innych) za pomocą wilgotnej ściereczki z dodatkiem łagodnego, ogólnie dostępnego środka czyszczącego. Usunąć zanieczyszczenia (np. włosy, resztki po-karmu, itp.) z ruchomych elementów wyrobu.	Wyrób należy czyścić każdorazowo, gdy zajdzie taka potrzeba, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu. Nie używać żadnych środków czyszczących na bazie chloru lub spirytusu metylowego. Przed rozpoczęciem korzystania z wyrobu tapiczerka musi być sucha.





Częstotliwość	Co należy skontrolować?	Czynności	Uwagi
Raz w miesiącu.	Osie kół, szybkozłącza (jeśli dotyczy).	Sprawdzić: <ul style="list-style-type: none"> czy koła swobodnie obracają się na osiach oraz czy nie ma luzów na osiach. Konserwacja polega na aplikacji pomiędzy oś, a piastę koła niewielkiej ilości środka konserwującego smarującego. Sprawdzić wpinanie i wypinanie koła. 	W razie stwierdzenia zabrudzeń, oczyścić koła z pozostałości pokarmów, kurzu, włosów lub innych. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
	Połączenia konstrukcji wyrobu (spawane, gwintowane, lutowane).	Sprawdzić: <ul style="list-style-type: none"> stan ramy wyrobu w miejscach łączenia (spawy, gwinty, lutowania). 	W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
	Opony, dętki (jeśli dotyczy).	Sprawdzić: <ul style="list-style-type: none"> stan zużycia bieżnika. Sprawdzić pod kątem widocznych uszkodzeń. Sprawdzić poziom ciśnienia w kołach (jeśli dotyczy). 	W razie stwierdzenia zbyt niskiego ciśnienia w kołach należy dopompować je do właściwego poziomu. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
Raz na 6 miesięcy.	Ruchome elementy konstrukcji.	Sprawdzić: <ul style="list-style-type: none"> ruchome elementy konstrukcji pod kątem ewentualnych uszkodzeń oraz konserwować je przy użyciu dedykowanego środka. 	W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
	Oznakowanie wyrobu.	Sprawdzić: <ul style="list-style-type: none"> oznaczenia i etykietę wyrobu pod kątem ich czytelności. 	W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
Po zakończeniu czasu użytkowania wyrobu.	Szczegółowy przegląd wyrobu.	Przegląd wyrobu.	Wytwórca określa czas użytkowania wyrobu, który jest podany w instrukcji obsługi. Po tym okresie użytkownik może używać wyrób tylko pod warunkiem odesłania go do producenta w celu dokonania przeglądu. Po dokonaniu przeglądu producent ponownie określi czas użytkowania wózka oraz datę kolejnego przeglądu. W przypadku pytań należy skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.

Wykaz wszystkich części zamiennych do pobrania na stronie www.akces-med.com, przy wybranym produkcie.






11 OZNAKOWANIE

11.1. Symbole

	Deklaracja, że wyrób spełnia wymagania zasadnicze		Chronić przed promieniami słonecznymi
	Numer katalogowy		Ograniczenie temperatury przechowywania
	Numer seryjny		Wilgotności względna przechowywania
	Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi		Suszyć pionowo
	Uwaga!		Nie chlorować
	Wytwórca		Nie prasować
	Data produkcji		Nie suszyć w suszarce bębnowej
	Wyrób nie zawiera lateksu		Nie stosować bielenia
	Przechowywać w suchym miejscu		Ostrożnie, delikatna zawartość
	Zakaz użytkowania wyrobu bez zapiętych pasów zabezpieczających		Zakaz pozostawiania pacjenta bez opieki w trakcie użytkowania wyrobu
			Zakaz zjeżdżania wózkiem po schodach, zarówno z pacjentem jak i bez

11.2. Przykładowa tabliczka znamionowa

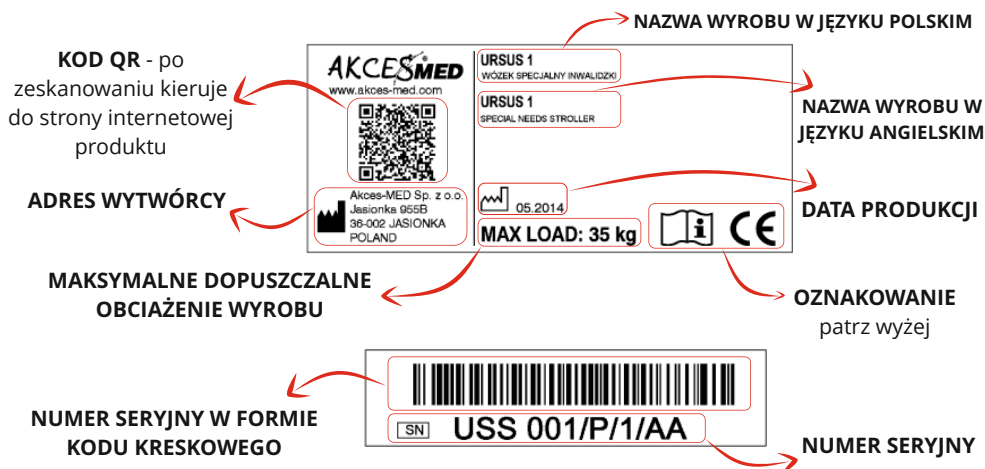



PRODUCENT PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH



Akces-MED Sp. z o.o.

Jasionka 955B

36-002 Jasionka

tel. (17) 864 04 70

www.akces-med.com

e-mail: produkcja@akces-med.com

Autoryzowany Przedstawiciel



Data wydania: **25.11.2013**

Data ostatniej aktualizacji: **24.05.2021**

Our passion - your independence!